



## Manuale d'uso

La piattaforma Cureety consente l'accesso al dispositivo medico Cureety TechCare, un algoritmo che permette la configurazione di questionari di monitoraggio personalizzati in base alla terapia e alla patologia specifica di ciascun paziente.

*Cureety TechCare è un dispositivo medico di Classe I.*

Questo manuale d'uso è destinato esclusivamente agli operatori sanitari che utilizzano Cureety TechCare.

1

# Informazioni generali



# Informazioni sulla sicurezza

## Utilizzo dello strumento

Cureety TechCare è un software progettato per generare una classificazione dello stato clinico dei pazienti con malattie croniche o a rischio di ospedalizzazione, al fine di facilitare il monitoraggio medico a distanza dei sintomi clinici e dei possibili eventi avversi, oltre alle consultazioni fisiche. I pazienti possono leggere messaggi informativi relativi al loro stato clinico, al fine di auto-monitorare e migliorare la loro qualità di vita.

## Controindicazioni

Il dispositivo non deve essere utilizzato da pazienti di età inferiore a 18 anni

## Precauzioni d'uso

- Il dispositivo deve essere utilizzato solo da un paziente con autonomia sufficiente per utilizzare gli strumenti digitali.
- Per il follow-up di pazienti la cui autonomia è insufficiente all'utilizzo degli strumenti digitali ma sufficiente per rispondere alle domande per telefono, il dispositivo può essere utilizzato al posto del paziente da un operatore sanitario che legge le domande per telefono.
- Gli operatori sanitari devono seguire una specifica formazione prima di utilizzare il dispositivo.
- Per monitorare i segni clinici e i possibili eventi avversi, gli operatori sanitari devono consultare sia le notifiche che la dashboard.
- Il dispositivo non è destinato ad essere utilizzato come strumento diagnostico, non può sostituire le pratiche mediche esistenti e non sostituisce i regolari consulti né il sistema convenzionale di gestione delle emergenze mediche nel trattamento del paziente.
- Il dispositivo deve essere utilizzato con uno dei seguenti browser: Google Chrome, Firefox, Safari. Non deve essere utilizzato con Edge o qualsiasi altro browser, anche se installato di default sullo smartphone, sul tablet o sul computer.
- L'applicazione potrebbe essere temporaneamente non disponibile durante le attività di manutenzione.
- Per utilizzare il dispositivo è necessaria una connessione a Internet.
- Le aree da migliorare e/o le incongruenze nei questionari e/o nelle soglie di classificazione riscontrate dagli operatori sanitari devono essere comunicate a Cureety per essere valutate.
- Qualsiasi incidente grave legato all'uso del dispositivo Cureety Techcare deve essere segnalato a Cureety e alle autorità competenti del proprio Paese.

# Informazioni generali

## Uso

L'applicazione Cureety e le funzionalità descritte nel presente manuale sono destinate ai professionisti del settore oncologico che svolgono attività clinica in strutture sanitarie sul territorio italiano.

Lo scopo dell'applicazione Cureety è quello di facilitare il monitoraggio degli effetti collaterali segnalati dai pazienti oncologici in cura presso l'istituto dell'utente.

L'applicazione Cureety non è uno strumento diagnostico, non può sostituire le pratiche mediche esistenti e non può sostituire i regolari consulti né il sistema convenzionale di gestione delle emergenze mediche nell'ambito del trattamento del paziente.

## Requisiti

L'accesso all'applicazione Cureety richiede l'utilizzo di un computer Windows o macOS, un browser internet (Chrome, Safari, Firefox) e un accesso a internet. Il suo utilizzo non richiede alcuna particolare procedura di manutenzione, se non il normale aggiornamento del sistema operativo e del browser internet.

# 2

## Vantaggi



# Vantaggi di Cureety per il paziente

All'interno dell'applicazione Cureety, il paziente risponde regolarmente al suo questionario. Una volta inviate le proprie risposte, è invitato a consultare i messaggi terapeutici in caso di tossicità minori o a contattare la sua struttura in caso di tossicità gravi.



**Messaggi terapeutici per i diversi effetti collaterali**



**Maggiore autonomia nel programma di assistenza**



**Un legame più forte con il personale sanitario**



**Condivisione di documentazione con il personale medico**

# Vantaggi di Cureety per il personale sanitario

Il personale curante può consultare i propri pazienti classificati in base al livello di gravità, inoltre ha accesso a una cartella clinica dettagliata (storia degli effetti collaterali, informazioni mediche sul paziente, terapia...).



**Riduzione del numero di telefonate**



**Risparmio di tempo durante il consulto**



**Monitoraggio accurato dei sintomi e gestione tempestiva delle emergenze**



**Programmazione delle visite in Day Hospital**


# 3

## Creazione di un account






# Creare l'account del personale sanitario

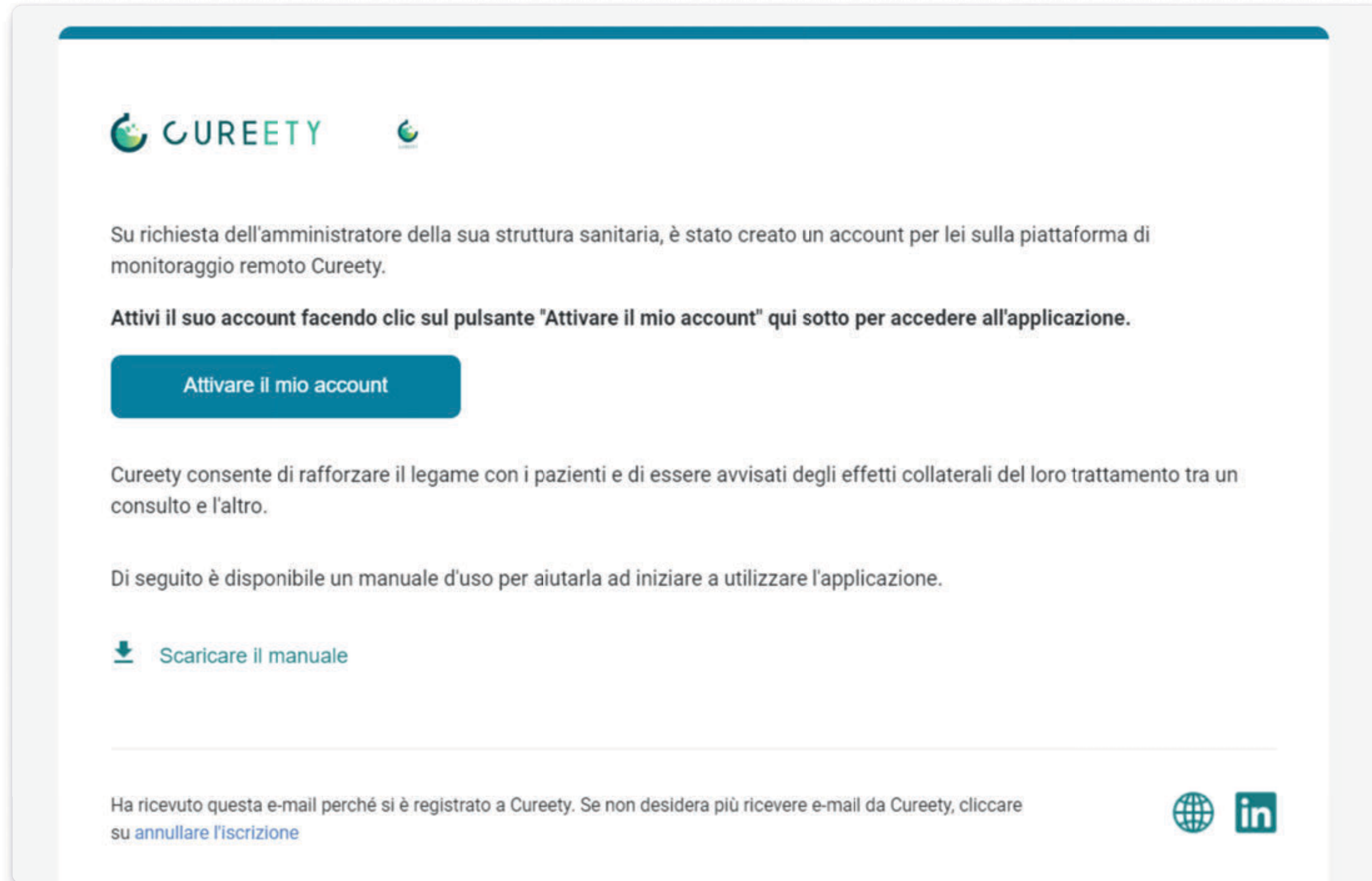

The screenshot shows the Cureety account activation page. At the top left is the Cureety logo. The main text explains that an account has been created for the user by their administrator. A prominent blue button labeled 'Attivare il mio account' is centered on the page. Below the button, there is a paragraph about Cureety's commitment to patient care and a link to download the user manual. At the bottom, there is a footer with a globe icon, the LinkedIn logo, and a link to 'annullare l'iscrizione'.

 CUREETY

Su richiesta dell'amministratore della sua struttura sanitaria, è stato creato un account per lei sulla piattaforma di monitoraggio remoto Cureety.

**Attivi il suo account facendo clic sul pulsante "Attivare il mio account" qui sotto per accedere all'applicazione.**



[Attivare il mio account](#)

Cureety consente di rafforzare il legame con i pazienti e di essere avvisati degli effetti collaterali del loro trattamento tra un consulto e l'altro.

Di seguito è disponibile un manuale d'uso per aiutarla ad iniziare a utilizzare l'applicazione.

[↓ Scaricare il manuale](#)


Ha ricevuto questa e-mail perché si è registrato a Cureety. Se non desidera più ricevere e-mail da Cureety, cliccare su [annullare l'iscrizione](#)

Un amministratore Cureety o un amministratore della vostra struttura sanitaria creerà un account sulla piattaforma. Riceverete quindi un'email per attivare il vostro account.

**Cliccate sul tasto "Attivare il mio account" per accedere al processo di attivazione.**

# Creare l'account del personale sanitario

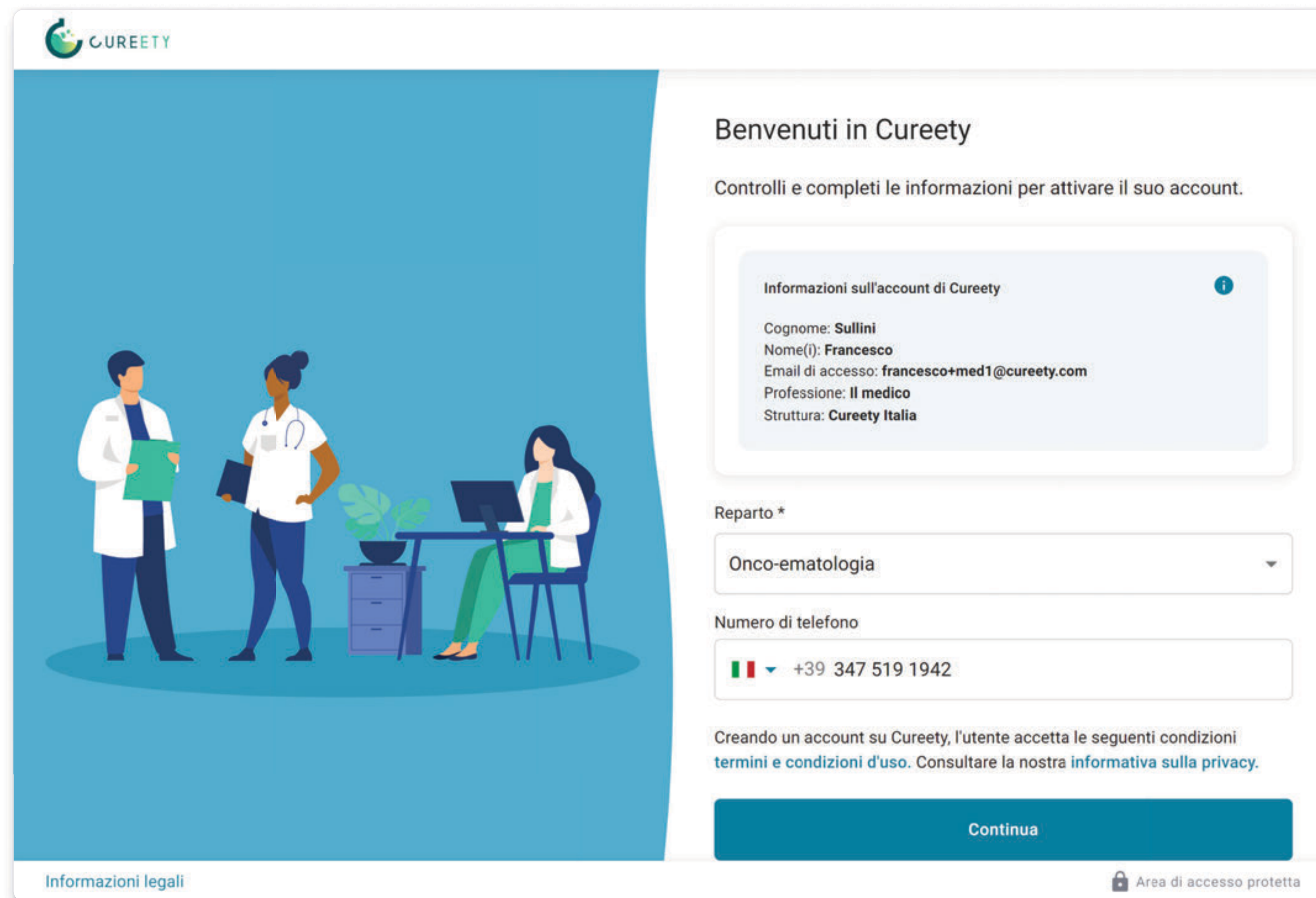

**CUREETY**

## Benvenuti in Cureety

Controlli e completi le informazioni per attivare il suo account.

**Informazioni sull'account di Cureety**

Cognome: **Sullini**  
Nome(i): **Francesco**  
Email di accesso: **francesco+med1@cureety.com**  
Professione: **Il medico**  
Struttura: **Cureety Italia**

Reparto \*

Onco-ematologia

Numero di telefono

+39 347 519 1942

Creando un account su Cureety, l'utente accetta le seguenti condizioni [termini e condizioni d'uso](#). Consultare la nostra [informativa sulla privacy](#).

**Continua**

Informazioni legali

Area di accesso protetta

Controlli che le informazioni inserite siano esatte e le corregga o completi se necessario.

Visioni i termini e condizioni d'uso.

**Clicchi sul pulsante "Continua"** per procedere allo step successivo.

# Creare l'account del personale sanitario

← Indietro

Scegliere la propria password

Password\*

Conferma della password\*

Criteri per la password

- ✓ Almeno 8 caratteri
- ✓ Una lettera maiuscola
- ✓ Una lettera minuscola
- ✓ Una cifra
- ✓ Un carattere speciale !"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[^\_`{|}~
- ✓ Conferma identica alla password

Continua

Informazioni legali


Area di accesso protetta

Scelga la **password** secondo le regole di sicurezza indicate.

Suggerimento: Può cliccare sull'occhio a destra del campo per rendere visibili i caratteri che sta inserendo.

**Clicchi sul tasto "Continua"** per confermare il suo account ed accedere alla piattaforma dei caregiver.

# Creare l'account del personale sanitario

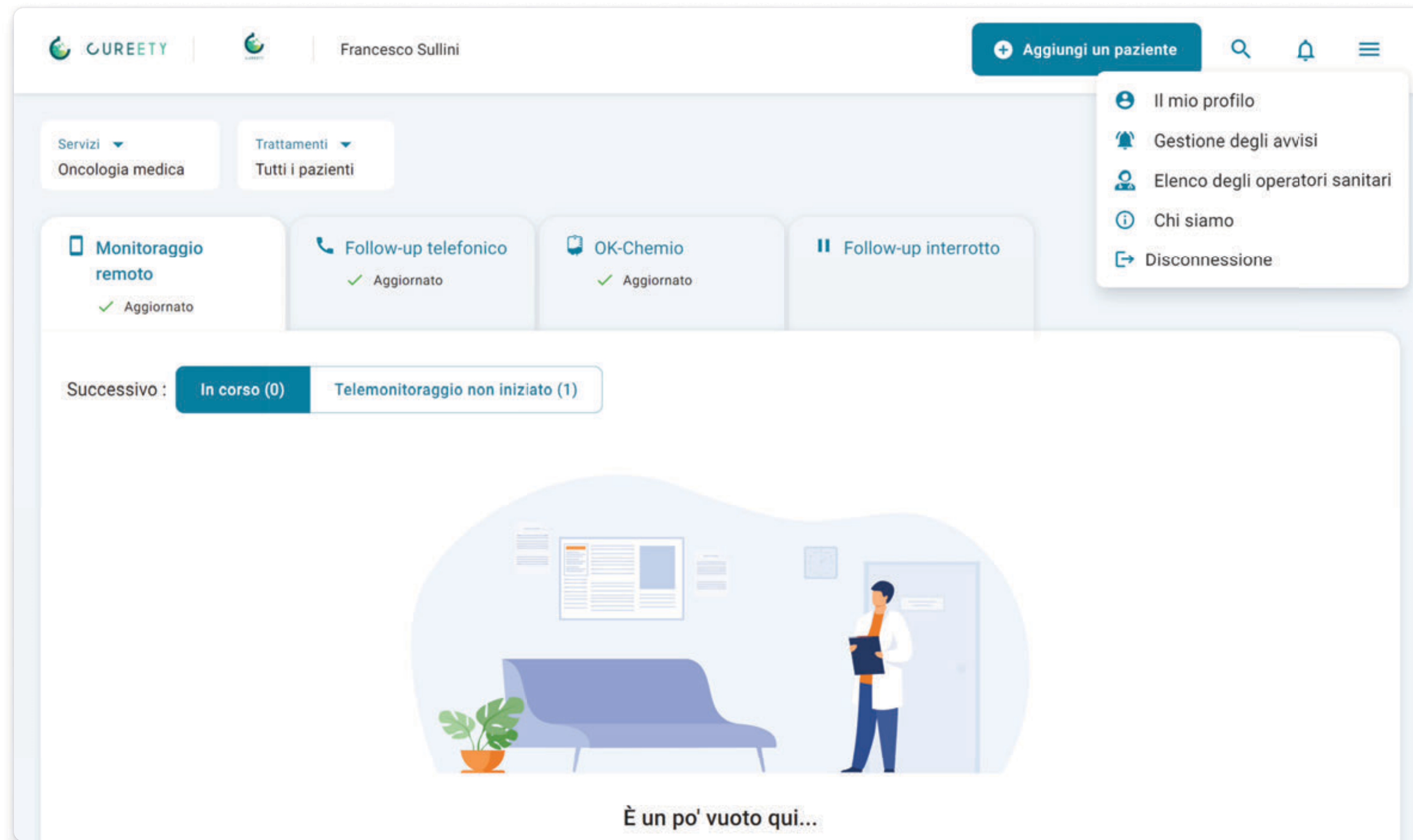

**Sarà quindi direttamente connesso alla piattaforma dei caregiver.**

Può disconnettersi cliccando su "Disconnessione" nel menu a discesa in alto a destra.

# 4

## Preregistrazione dei pazienti



# Aggiungere un nuovo paziente

The screenshot shows the Cureety web interface for Dr. Marion. At the top right, there is a prominent blue button labeled "Aggiungi un paziente". Below the navigation bar, there are filters for "Servizi" (Solo i miei pazienti) and "Trattamenti" (Chirurgia). A row of status cards includes "Monitoraggio remoto" (Aggiornato), "Follow-up telefonico" (Aggiornato), "OK-Chemio" (Aggiornato), and "Follow-up interrotto". A "Successivo" section shows "In corso (0)" and "Telemonitoraggio non iniziato (0)". The main content area features an illustration of a doctor in a white coat holding a clipboard in a waiting room. Below the illustration, the text reads: "È un po' vuoto qui... Esistono due possibilità: Al momento non sono stati aggiunti pazienti per il monitoraggio remoto."

1

Dalla schermata iniziale, clicchi su "Aggiungi un paziente" per includere un nuovo paziente in Cureety.

# Scegliere il tipo di monitoraggio

← Aggiungi un paziente ×

1 Patologia e follow-up 2 Informazioni per il paziente 3 Trattamento/i 4 Questionario 5 Ulteriori approfondimenti 6 Conferma

**Patologia e follow-up**

Patologia \*

Patologia oncologica

Tipo di monitoraggio \*

Telemonitoraggio  Follow-up telefonico

Confermo di aver informato il paziente prima del suo inserimento nella Piattaforma CUREETY e di aver ottenuto il suo consenso a tal fine e alla condivisione dei suoi dati sanitari con Cureety.

Passo successivo →

2

Selezioni la patologia per la quale desidera monitorare il paziente.

3


Scelga il tipo di monitoraggio più adatto al suo paziente.

Il monitoraggio telefonico è raccomandato per i pazienti che non hanno accesso ad un dispositivo digitale, che non sono indipendenti e non hanno un badante, o che non desiderano utilizzare l'applicazione.

4

Spunti la casella per confermare di aver ottenuto il consenso del paziente per essere registrato su Cureety.

# Inserimento informazioni personali e mediche

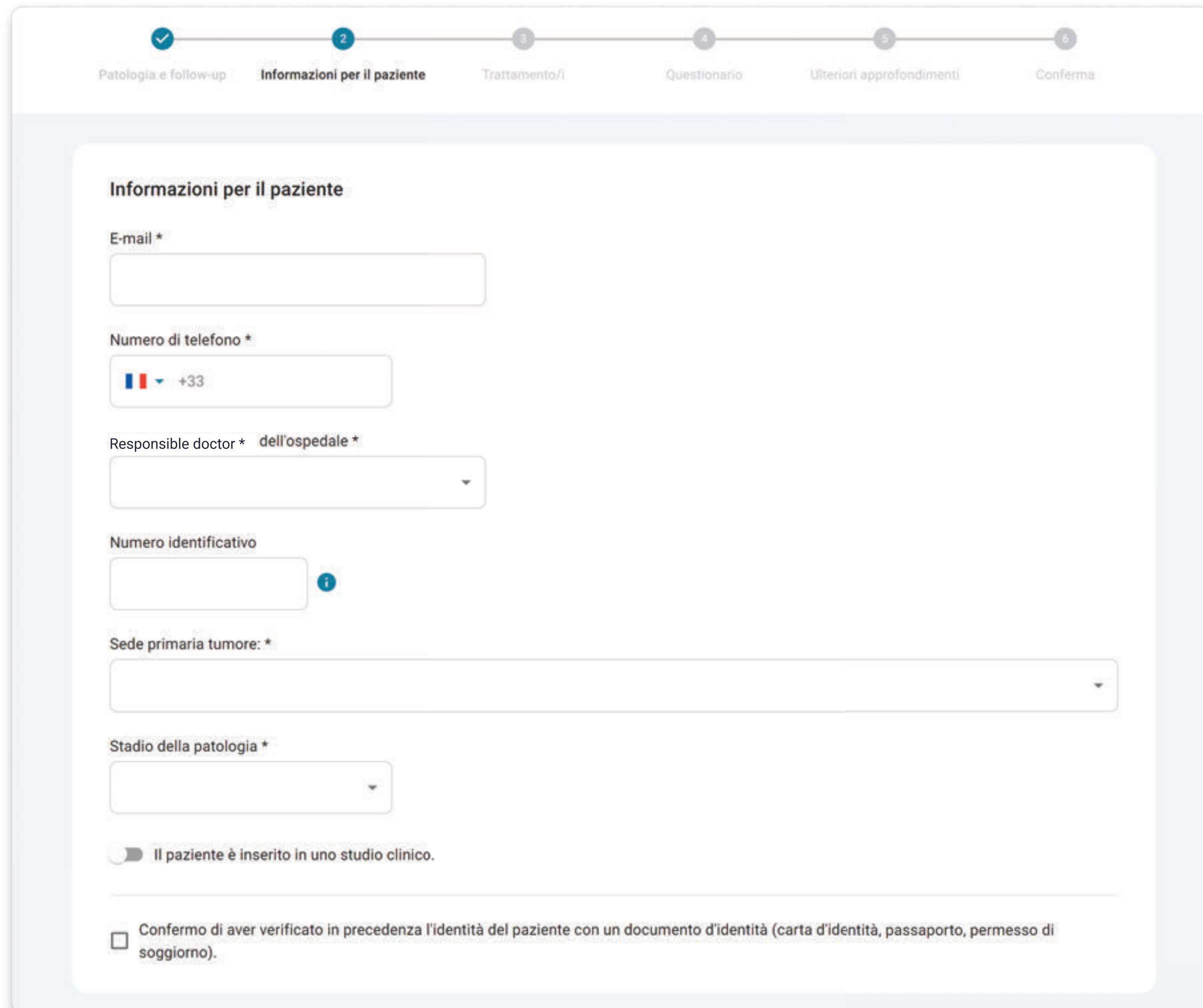

Patologia e follow-up **2** Informazioni per il paziente Trattamento/i Questionario Ulteriori approfondimenti Conferma

**Informazioni per il paziente**

E-mail \*

Numero di telefono \*

Responsible doctor \* dell'ospedale \*

Numero identificativo

Sede primaria tumore: \*

Stadio della patologia \*

Il paziente è inserito in uno studio clinico.

Confermo di aver verificato in precedenza l'identità del paziente con un documento d'identità (carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno).

5

Inserisca i dettagli di contatto del paziente.

Prestate attenzione quando inserite l'indirizzo email. Questo permetterà al paziente di collegarsi per attivare il suo account ed accedere all'applicazione. Se l'email è incorretta, l'accesso a Curety non sarà possibile.

6

Selezioni il medico responsabile e i dettagli della patologia del pazientei.

7

*Facoltativo:* Specificare se il paziente sta prendendo parte ad un trial clinico.

8

Spunti la casella per confermare di aver verificato l'identità del paziente attraverso un documento d'identità.



# Aggiungere il trattamento

← Aggiungi un paziente ×

✓ ✓ 3 4 5 6

Patologia e follow-up Informazioni per il paziente **Trattamento/i** Questionario Ulteriori approfondimenti Conferma

**Trattamento(i)**

Trattamento

🔍 Digitare il nome del trattamento che si sta cercando

← Passo precedente

Passo successivo →

9

Ricerchi il trattamento del paziente digitando almeno le prime tre lettere del trattamento.

I trattamenti sono elencati in tre tipologie: iniezione, per os, o protocolli. E' possibile cercare per molecola, nome commerciale o nome del protocollo.

Può aggiungere quanti trattamenti desidera.

# Impostare il trattamento

The screenshot shows a multi-step process for setting up a treatment. The progress bar at the top indicates the current step is 'Trattamento/i' (step 3). The form contains the following elements:

- Trattamento(i)** section:
  - A dropdown menu for 'Iniezione' with 'Triptorelina (Decapeptyl®)' selected.
  - Two date input fields: 'Data di inizio' and 'Data di fine', both with the placeholder 'gg/mm/aaaa'.
  - A blue button labeled '+ Completare il programma di iniezione'.
- Trattamento** section:
  - A search input field with the placeholder 'Digitare il nome del trattamento che si sta cercando'.
- A toggle switch labeled 'Includere il paziente nel modulo "OK-Chemio" per convalidare le iniezioni', which is currently turned on.
- A light blue box containing the text: 'Il paziente riceverà un SMS di promemoria automatico prima di ogni iniezione'.
- A list of items:
  - D-4: promemoria per le analisi biologiche
  - D-1: promemoria per aggiungere i risultati dell'analisi alla cartella clinica e per rispondere al questionario sulla salute

10

Completi le informazioni del trattamento.

Raccomandiamo di indicare almeno la data teorica di inizio e fine trattamento.

Per le iniezioni, può, se lo desidera, specificare la data di iniezione.

Se lo desidera, può anche indicare il dosaggio delle somministrazioni orali.

11

*Facoltativo:* Indicare se si desidera includere il paziente nel modulo "OK-Chemio".

Questo modulo è utilizzato per pre-validare anticipatamente la visita ambulatoriale del paziente per la sua iniezione di chemioterapia.

Il paziente viene quindi invitato a compilare il suo questionario sulla tossicità e inviare i risultati delle analisi prima di ogni sessione di chemioterapia.

# Selezionare il questionario sulla tossicità

Aggiungi un paziente

Patologia e follow-up   Informazioni per il paziente   Trattamento/i   **Questionario**   Ulteriori approfondimenti   Conferma

### Questionario sulla tossicità

Cureety raccomanda il seguente questionario per il/i trattamento/i inserito/i.

Ormonoterapia di I e II generazione (ITA)

(italiano) Ormonoterapia (prostata)

(italiano) Ormonoterapia (seno)

13 sintomi richiesti

Altri sintomi   Dolore   Diarrea   Disturbi della personalità   Nausea / Vomito   Artralgia / Mialgia   Astenia   Problemi alla vista   Edema

Eruzione cutanea   Costipazione   Vampate di calore   Cefalea

Frequenza di risposta prevista: ogni  giorni

Cerca altri questionari

Passo precedente   Passo successivo

12

Selezioni il questionario sulla tossicità che desidera assegnare al paziente.

Cureety le offre questionari su misura per il(i) trattamento(i) che ha inserito.

Di default, la frequenza di risposta prevista è impostata su 7 giorni. Può modificare la frequenza se richiesto.

Si noti che se il questionario raccomandato da Cureety non dovesse essere adatto, può cercarne altri cliccando sul pulsante "Cerca altri questionari".

# Selezionare questionari di follow-up aggiuntivi

Aggiungi un paziente

Patologia e follow-up   Informazioni per il paziente   Trattamento/i   Questionario   **Ulteriori approfondimenti**   Conferma

### Questionario di follow-up aggiuntivo

I questionari di follow-up aggiuntivi consentono di seguire la situazione del paziente più da vicino.  
2 i questionari sono stati assegnati automaticamente a questo paziente.

Nome del questionario	Tipo	Frequenza di invio	Prove	Domande
<input checked="" type="checkbox"/> Questionario di soddisfazione	Soddisfazione	30 giorni	Solo una volta	5
<input checked="" type="checkbox"/> Questionario sulla qualità della vita (EQ5D)	Qualità della vita	45 giorni	Più volte	7

Ha bisogno di monitorare altri indicatori?  
Altri questionari (post-operatorio, alimentazione, stato psicologico...) possono essere creati su richiesta per la sua struttura.  
Non esiti a contattarci a [assistenza@cureety.com](mailto:assistenza@cureety.com) per parlarci delle sue esigenze.

← Passo precedente   Passo successivo →

13

Spunti i questionari di follow-up aggiuntivi che desidera assegnare al paziente.

Le permettono di monitorare altri parametri come la soddisfazione, la qualità della vita e l'aderenza al trattamento.

Si noti che i questionari possono essere creati su richiesta della sua struttura sanitaria.

# Verificare e confermare

Aggiungi un paziente

Patologia e follow-up   Informazioni per il paziente   Trattamento(i)   Questionario   Ulteriori approfondimenti   **Conferma**

**Conferma delle informazioni inserite**

**Patologia e follow-up**

Patologia: Tumore  
Tipo di monitoraggio: Telemonitoraggio

**Informazioni per il paziente**

Email: francesco+test@cureety.com  
Numero di telefono: +393495192042  
Medico di riferimento dell'ospedale: Dr Sullini  
Sede primaria del tumore: Tumore al polmone  
Stadio del tumore: Localizzato

**Trattamento(i)**

- Iniezione : Nivolumab (Opdivo®)

**Questionario sulla tossicità**

Questionario: (italiano) Immunoterapia  
Frequenza di invio: Ogni 7 giorni

**Questionario di follow-up aggiuntivo**

- Questionario di soddisfazione
- Questionario sulla qualità della vita (EQ5D)

← Passo precedente   Conferma della creazione del paziente ✓

14

Controlli che tutte le informazioni inserite siano corrette e clicchi sul pulsante di conferma per validare l'inserimento del paziente.

Clicchi sull'icona "matita" per ritornare direttamente allo step precedente ed apportare modifiche.

*I pazienti registrati per il monitoraggio app ricevono un email ed un messaggio per attivare il loro account ed accedere all'applicazione.*

# 5

## Il pannello di controllo



# Il pannello di controllo

Barra di navigazione (aggiungi e cerca pazienti, allerte, menu)

Filtri pazienti per dipartimento e/o trattamento


Schede per la navigazione tra le liste pazienti

Contenuti della scheda selezionata (default "Monitoraggio remoto")

The screenshot displays the CUREETY control panel for Dr. Marion. It features a navigation bar at the top with a search icon, a notification bell, and a menu icon. Below the navigation bar, there are filter buttons for 'Servizi' (set to 'Solo i miei pazienti') and 'Trattamenti' (set to 'Iniezione e/o Per os'). The main area contains four status cards: 'Monitoraggio remoto' (4 patients to be revalidated), 'Follow-up telefonico' (3 patients to be called), 'OK-Chemio' (updated), and 'Follow-up interrotto'. A 'Successivo' section shows 'In corso (7)' and 'Telemonitoraggio non iniziato (2)'. A table lists patients with their status, names, phone numbers, treatments, consultation options, and questionnaire confirmation buttons.


Stato	Paziente	Trattamento/i in corso	Consulto	Questionario
22 nov 2023	Aurore BOREAL +33 6 00 00 98 76	Cisplatine mer 22 nov	⊕ Consulto	Confermare
22 nov 2023	Claire VOYANT +33 6 00 00 98 76	Pemigatinib (Pemazyre®)	⊕ Consulto	Confermare
22 nov 2023	Cathy MINIE +33 6 00 00 98 76	Prednisone (Cortancyl®)	⊕ Consulto	Confermare
08 nov 2023	Marcelle CHAPON +33 6 00 00 98 76	Cisplatine	⊕ Consulto	Confermare

# Il pannello di controllo

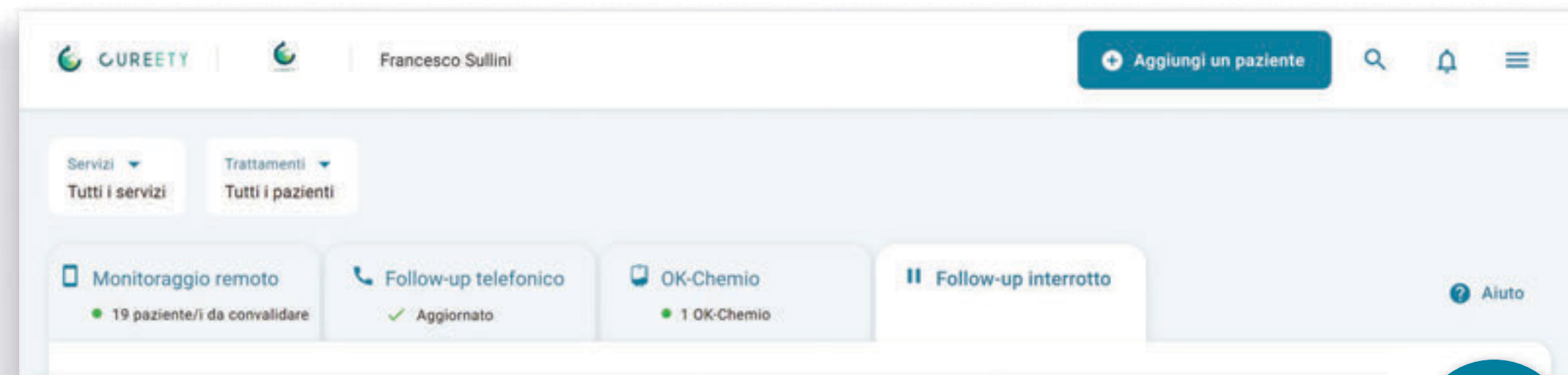

5

Il pulsante "Aiuto", a destra delle schede, dà accesso ad una spiegazione dettagliata delle differenti classificazioni dei pazienti monitorati

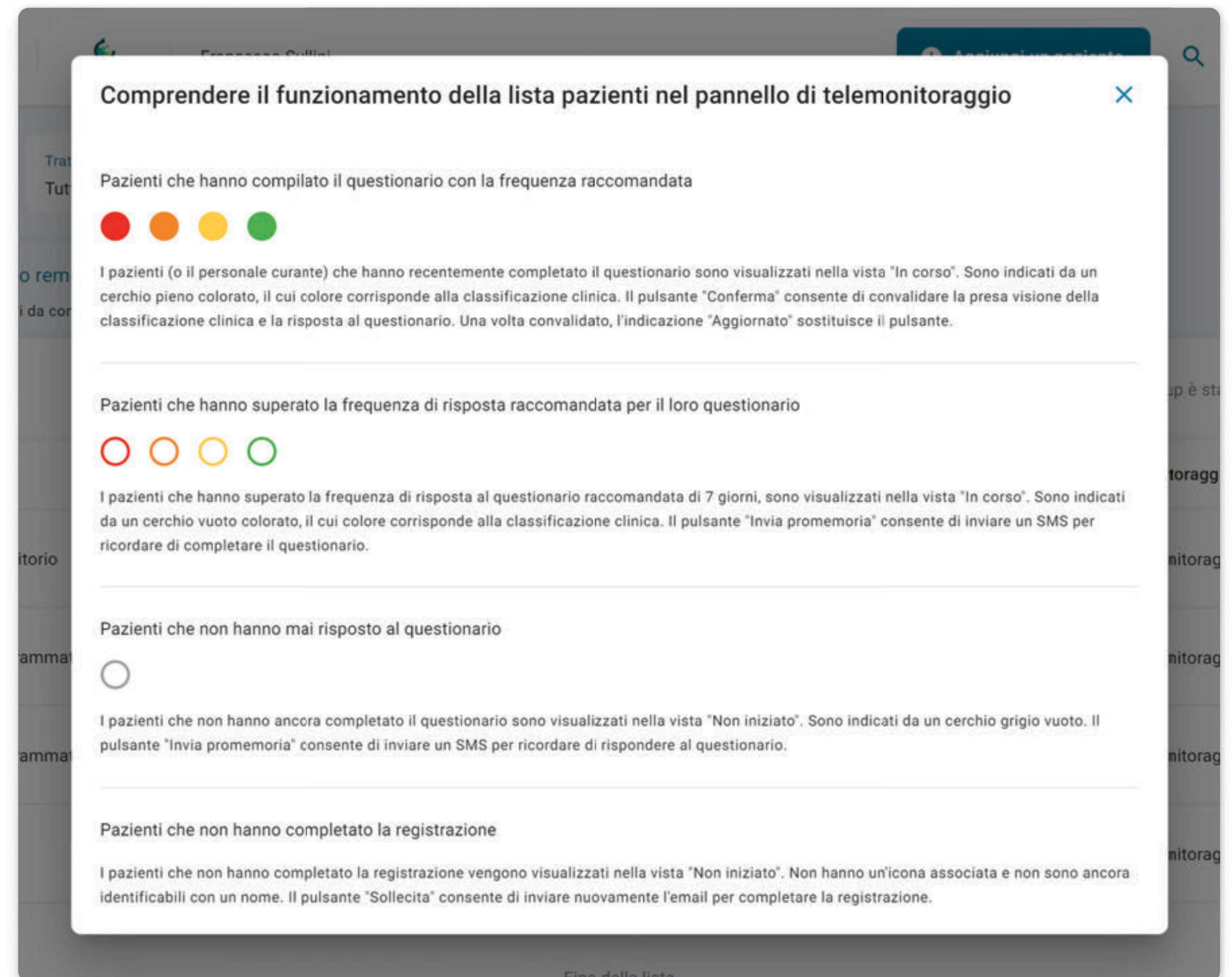



# Scheda "Monitoraggio remoto"

Ricerca tra le liste dei pazienti che sono attualmente monitorati e quelli che non hanno attivato il loro account o completato il primo questionario

I pazienti che hanno recentemente completato il questionario appaiono in alto nella tabella, con un pulsante "Confermare"

I pazienti di cui i questionari sono stati confermati appaiono al secondo posto

I pazienti che non hanno risposto per un lungo periodo di tempo appaiono alla fine della lista, con vicino un pulsante che permette di inviare loro un promemoria

The screenshot shows a dashboard for remote monitoring. At the top, there are four tabs: 'Monitoraggio remoto' (4 patients to validate), 'Follow-up telefonico' (3 patients to call), 'OK-Chemio' (updated), and 'Follow-up interrotto'. Below the tabs, there are filters for 'Successivo' (In corso (7), Telemonitoraggio non iniziato (2)) and a total of 9 registered patients. The main table has five columns: Stato, Paziente, Trattamento/i in corso, Consulto, and Questionario. The table lists seven patients with their names, phone numbers, treatments, consultation dates, and questionnaire status. The first two patients have a 'Confermare' button, the next two have a 'Confermato' status, and the last one has an 'Invia un promemoria' button.

Stato	Paziente	Trattamento/i in corso	Consulto	Questionario
22 nov 2023	Aurore BOREAL +33 6 00 00 98 76	Cisplatine mer 22 nov	Consulto	Confermare
22 nov 2023	Claire VOYANT +33 6 00 00 98 76	Pemigatinib (Pemazyre®)	Consulto	Confermare
22 nov 2023	Cathy MINIE +33 6 00 00 98 76	Prednisone (Cortancyl®)	Consulto	Confermare
08 nov 2023	Marcelle CHAPON +33 6 00 00 98 76	Cisplatine	Consulto	Confermare
21 nov 2023	Etienne ANDRIEUX +33 6 00 00 98 76	5-Fluoro-Uracile x Oxaliplatine (Eloxatine®) mer 29 nov	Consulto	Confermato il 21 nov 2023
08 nov 2023	Thomas DELAHAYE +33 6 00 00 98 76	Cisplatine	mer 29 nov	Confermato il 08 nov 2023
Nessuna risposta dal il 26 set 2023	Aude JAVEL +33 6 00 00 98 76	Cisplatine	gio 14 dic	Invia un promemoria Ultimo su 08 nov 2023

Fine della lista

# Scheda "Follow-up telefonico"

I pazienti che devono essere chiamati il giorno stesso appaiono in alto nella tabella, con un pulsante "Iniziare"

1

I pazienti per i quali la chiamata è programmata in futuro appaiono per secondi, e la data può essere modificata se necessario

2

Stato	Paziente	Il medico	Trattamento/i in corso	Consulto	Chiamata
● 09 nov 2023	Jean-philippe FOURNIER +33 6 00 89 00 00 76 anni	Dr. Marion	Acétate d'abiraterone(Zytiga®)	mer 22 nov	mar 21 nov <b>Iniziare</b>
○ Aggiunto il 08 nov 2023	Raphaël GARRIDO +33 6 00 56 00 87 57 anni	Dr. Marion	Pembrolizumab (Keytruda®)	+ Consulto	mer 22 nov <b>Iniziare</b>
● 22 nov 2023	Jade ROUSSEAUX +33 6 00 00 98 79 83 anni	Dr. Marion	Chloraminophène (Chlorambucil®) Rituximab (Mabthera®)	+ Consulto	gio 30 nov ✓ Aggiornato

# Modulo Follow-up telefonico

Accesso al questionario sulla tossicità del paziente così che possa rispondere alle domande insieme al paziente

1

Spazio per prendere note o relazioni sulla discussione

2

Scegliere la data della prossima chiamata

3

Follow-up telefonico del paziente

Compilazione del questionario con il paziente

Note o sintesi sulla corrispondenza

Data della prossima chiamata \*

gg/mm/aaaa

Confermare

# Scheda "OK-Chemio"

Visualizzazione della giornata e navigazione giorno-per-giorno








Di default, la lista dei pazienti programmati per la chemioterapia il giorno successivo è mostrata per prima

I pazienti che attendono conferma per la chemioterapia sono segnati con un pulsante "Da confermare"

I pazienti la cui chemioterapia è stata confermata, cancellata o posticipata

The screenshot displays the 'OK-Chemio' interface with the following elements:

- Navigation tabs: Monitoraggio remoto (5 paziente/i da convalidare), Follow-up telefonico (2 paziente/i da chiamare), **OK-Chemio** (2 OK-Chemio), Follow-up interrotto, and Aiuto.
- Calendar navigation: Days from martedì 21 novembre to sabato 25 novembre. The selected day is giovedì 23 novembre (1/3 patients).
- Table of patients:

Stato	Paziente	Il medico	Tipo di monitoraggio	Consulto	OK-Chemio
 22 nov 2023	Aurore BOREAL	Dr. Marion	Telemonitoraggio	 Consulto	<input type="button" value="Da confermare"/>
 22 nov 2023	Jade ROUSSEAU	Dr. Marion	Follow-up telefonico	 Consulto	<input type="button" value="Da confermare"/>
 Aggiunto il 08 nov 2023	Raphaël GARRIDO	Dr. Marion	Follow-up telefonico	 Consulto	 Confermato

Fine della lista

# Modulo di conferma chemio

- 1 Risultati analisi archiviati nella documentazione clinica dal paziente o dal curante
- 2 Risultati dell'ultimo questionario sulla tossicità
- 3 Report sintetico degli effetti collaterali e degli eventi clinici degli ultimi 30 giorni
- 4 Pulsante per confermare o cancellare/riprogrammare la chemioterapia

**Conferma dell'iniezione del paziente**

**Jade ROUSSEAU**

Sesso: Donna, Età: 83 anni, Peso: 64 kg, BMI: N/A, Telefono: +33 6 00 00 98 79, Medico curante: Dr. Marion

**Ultimo questionario sullo stato di salute**

Stato da monitorare: Mercoledì 22 novembre a 17:47 - 7 effetti collaterali (Completato da Dr. Marion)

Messaggio ricevuto dal paziente (Vedi)

**Effetti collaterali segnalati**

- Disturbi urinari (Grade 1)
- Costipazione (Grade 2)
- Astenia (Grade 1)
- Dolore (Grade 1)

**Ultime analisi cliniche**

risultati-analisi-biologiche-221... Risultato delle analisi cliniche - aggiunta da médecin référent Marion il 23/11/2023

**Report sintetico (ultimi 30 giorni)**

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8 (Nulla d...)	9	10 (Iniezione Rituximab...)	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22 (2 Costi...)	23	24 (Iniezione Rituximab...)	25	26

Buttons: Annullare o riprogrammare, Conferma

# Scheda "Follow-up interrotto"

Lista dei pazienti per i quali il monitoraggio è stato messo in pausa, riportandone la ragione (morte, remissione, modifica della struttura, ecc.)

1

Pazienti il cui follow-up è stato interrotto : 4

Stato	Interruzione	Paziente	Il medico	Tipo di monitoraggio
Remissione	mer 08 nov	<a href="#">Aude JAVEL</a>	Dr. Marion	<input type="checkbox"/> Telemonitoraggio
Cure palliative	gio 23 nov	<a href="#">Artie SHOW</a>	Dr. Marion	<input type="checkbox"/> Telemonitoraggio
Decesso	mer 08 nov	<a href="#">Christophe GIROD</a>	Dr. Marion	<input type="checkbox"/> Telemonitoraggio
Decesso	lun 09 ott	<a href="#">Anna CONDA</a>	Dr. Marion	<input type="checkbox"/> Telemonitoraggio

# 6

## Il profilo paziente



# Il profilo paziente

Barra di navigazione (notifiche, messaggi, accesso al questionario, ecc.)

Informazioni generali del paziente (identità, dettagli di contatto, patologia, ecc.)

Conferma delle risposte al questionario sulla tossicità e storico delle classificazioni cliniche


Report riassuntivo degli effetti collaterali ed eventi clinici passati in formato calendario

1

2

3

4

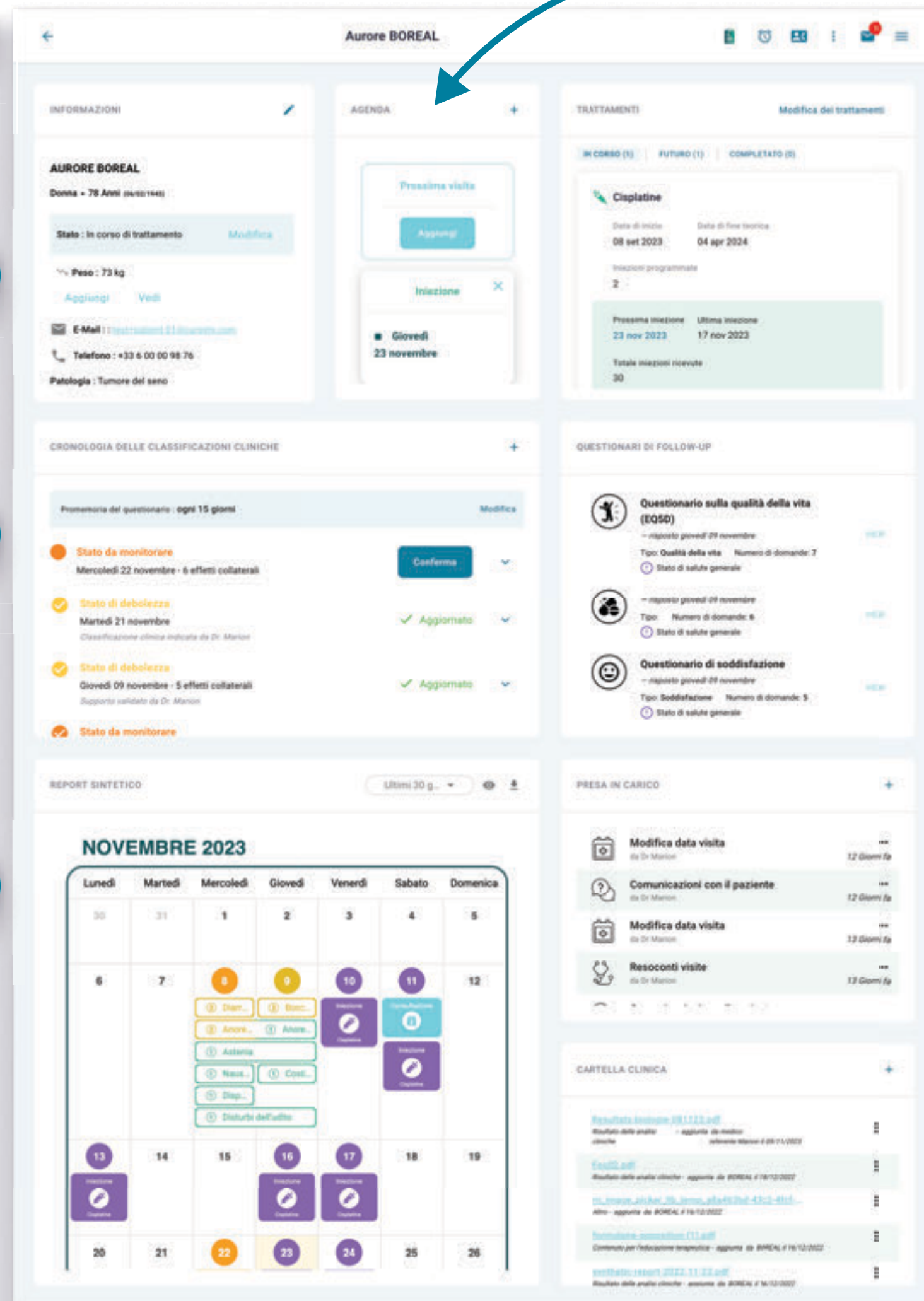

5

6

7

8

9

Gestione appuntamenti medici

Gestione dei trattamenti e delle date di iniezione

Risposte a questionari di follow-up addizionali (soddisfazione, qualità della vita, aderenza al trattamento, ecc.)

Storico degli aggiustamenti o supporto aggiuntivo (i.e. scambi, report dei consulti, ospedalizzazione, ecc.)


Cartella per condividere documenti con il paziente: inviare e ricevere risultati di analisi, prescrizioni, ecc.



# Messaggistica

Messaggi non letti seguiti dallo storico di quelli letti

1

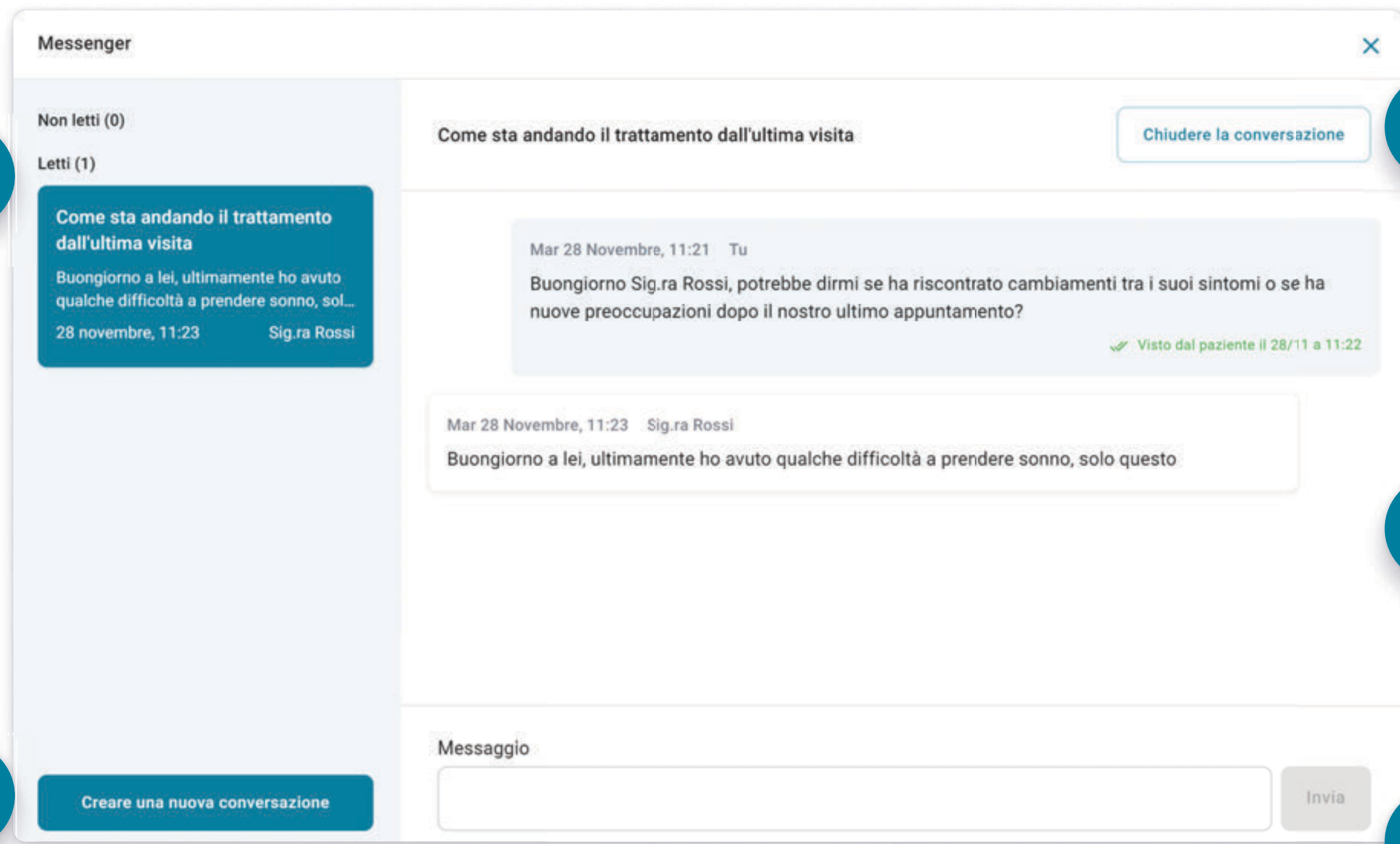

Può iniziare una nuova conversazione con il paziente in ogni momento

2

Può chiudere una conversazione se non si aspetta ulteriori risposte: per il paziente non sarà più possibile inviare messaggi in quella discussione

3

Aprire conversazioni con lo storico dei messaggi scambiati e conferma quando un messaggio è stato letto dal paziente

4

Noti che quando il paziente lascia un messaggio nel questionario sulla tossicità, il messaggio viene recapitato in questo spazio di messaggistica e dove può rispondere.

Spazio per inserire il suo messaggio

5

# 7

## Comprendere l'algoritmo



# Comprendere l'algoritmo di Cureety

Al termine del questionario, il paziente è classificato in una delle 4 categorie di rischio.

Ogni categoria di rischio corrisponde ad un range di punti.

Per ogni risposta vengono assegnati dei punti secondo il grado di tossicità.

La classificazione clinica corrisponde alla somma dei punti per ogni risposta.

**Buono**

**Da 0 a 2 punti**

Il paziente è rassicurato e riceve un messaggio terapeutico in base ai propri effetti collaterali minori.

**Fragilizzato**

**Da 2 a 8 punti**

Il paziente è rassicurato ed invitato a consultare il proprio messaggio terapeutico.

**Da monitorare**

**Da 8 a 32 punti**

Il paziente è invitato a contattare il personale curante per una presa in carico non urgente.

**Critico**

**Più di 32 punti**


Il paziente è invitato a contattare il personale curante per una presa in carico urgente.

# 8

## Password dimenticata



# Password dimenticata

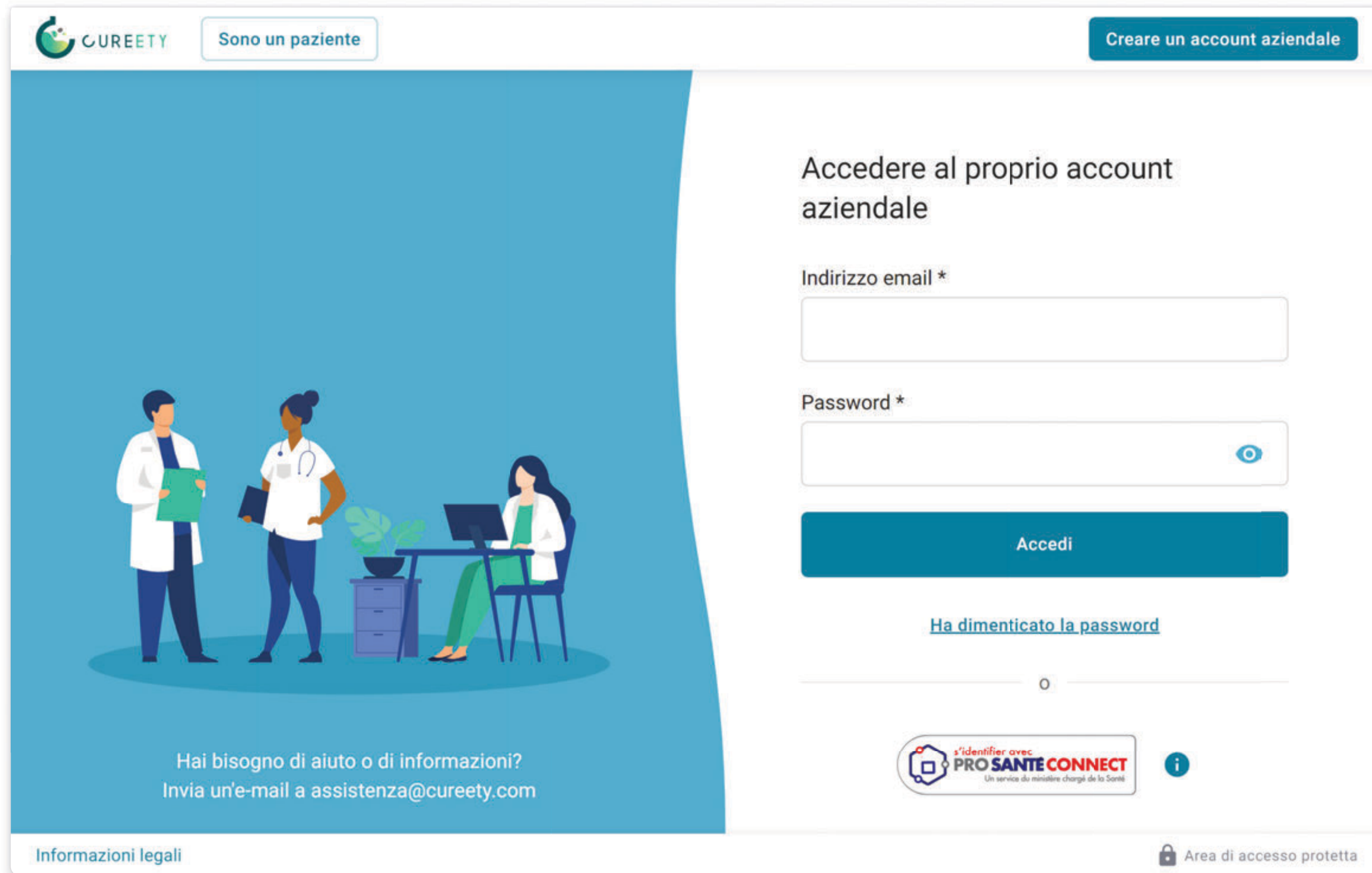

The screenshot shows the Cureety website interface. At the top left is the Cureety logo and a button labeled "Sono un paziente". At the top right is a button labeled "Creare un account aziendale". The main content area is split into two sections. The left section has a blue background with an illustration of three healthcare professionals (two standing, one sitting at a desk) and the text: "Hai bisogno di aiuto o di informazioni? Invia un'e-mail a [assistenza@cureety.com](mailto:assistenza@cureety.com)". The right section is white and contains the login form. It starts with the heading "Accedere al proprio account aziendale". Below this are two input fields: "Indirizzo email \*" and "Password \*". The password field has an eye icon to toggle visibility. A teal "Accedi" button is positioned below the fields. Underneath the button is a link: "[Ha dimenticato la password](#)". At the bottom of the form area, there is a separator line with a small circle in the center. Below the separator is a logo for "s'identifier avec PRO SANTE CONNECT" with the tagline "Un service du ministère chargé de la Santé" and an information icon. At the very bottom of the page, there is a link for "Informazioni legali" on the left and a lock icon with the text "Area di accesso protetta" on the right.

1

Cliccare su "Ha dimenticato la password" in basso nell'interfaccia di accesso.

# Password dimenticata

CUREETY Sono un paziente

← Indietro

## Reimpostare la password

Per reimpostare la password, è necessario accedere all'indirizzo email associato al proprio account Cureety. Queste informazioni di verifica garantiscono che solo lei possa accedere al suo account.

Una volta inserito il proprio indirizzo email, riceverà un'email con un link per reimpostare la password.

E-mail \*

Inviare


Informazioni legali

Area di accesso protetta

2

Inserisca l'indirizzo email d'accesso per ricevere un link per resettare la password.

# Password dimenticata

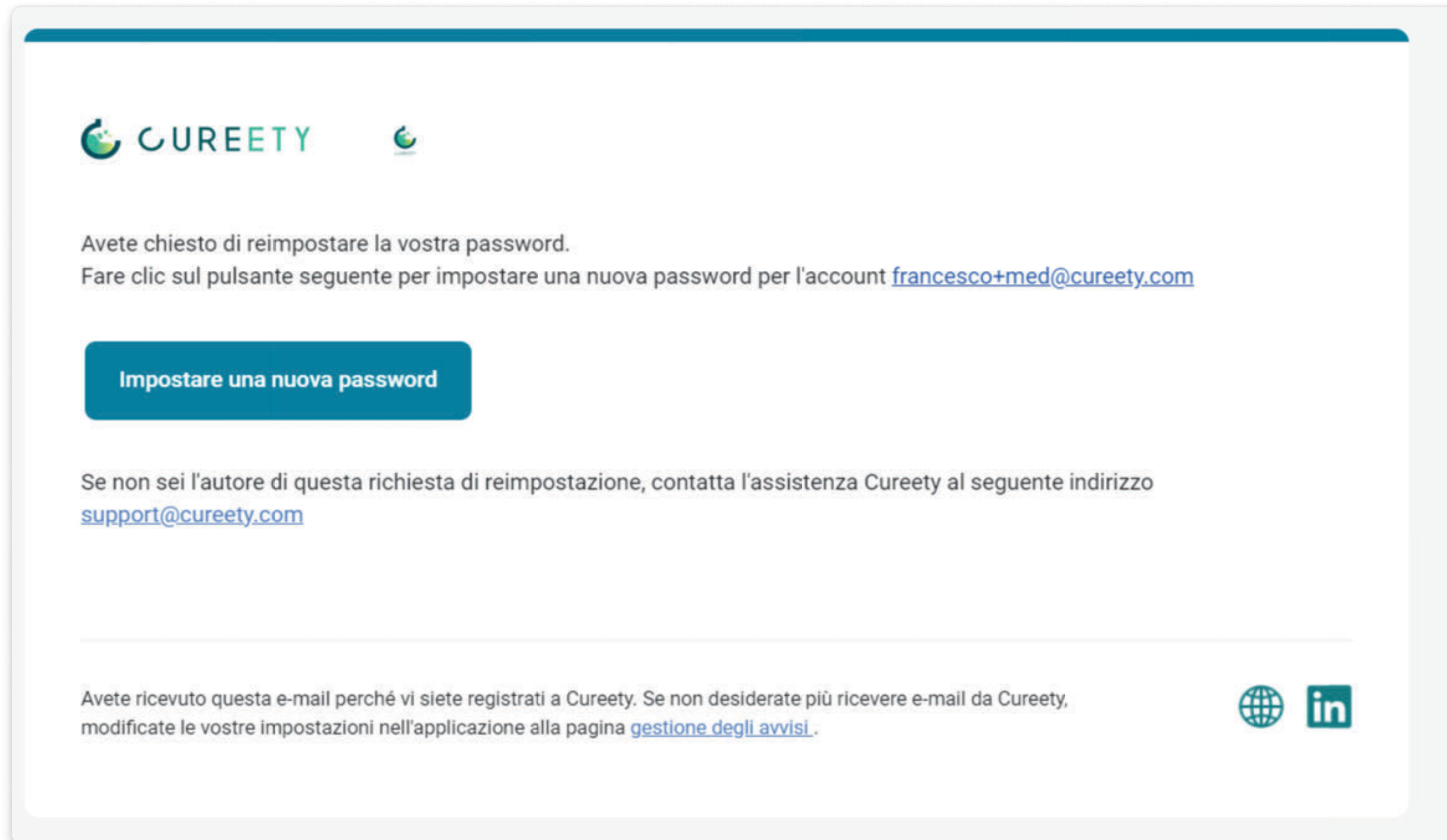

3

Nell'email, clicchi sul pulsante "Impostare una nuova password".

Successivamente può decidere la sua nuova password e accedere all'applicazione

# 9

## Contatti





# Contatti

**Nicolas BEGIN**

[nicolas@cureety.com](mailto:nicolas@cureety.com)

**François-Guirec  
CHAMPOISEAU**

[francois@cureety.com](mailto:francois@cureety.com)

**Jamie LU**

[jamie@cureety.com](mailto:jamie@cureety.com)

**Francesco SULLINI**

[francesco@cureety.com](mailto:francesco@cureety.com)

# Supporto tecnico

Se riscontra qualsiasi problema nell'utilizzo dell'applicazione, per favore contatti la nostra assistenza tecnica:

- per email all'indirizzo [assistenza@cureety.com](mailto:assistenza@cureety.com)
- per telefono al numero **347 519 1942**



Cureety TechCare



**Cureety TechCare** è un'applicazione software progettata per generare una classificazione dello stato clinico dei pazienti con malattie croniche o a rischio di ospedalizzazione, al fine di facilitare il monitoraggio medico a distanza dei segni clinici e dei possibili eventi avversi, oltre ai consulti fisici. I pazienti possono leggere messaggi informativi relativi al loro stato clinico, al fine di auto-monitorare e migliorare la propria qualità di vita.

**Cureety TechCare** è un dispositivo medico conforme alla regolamentazione europea. È utilizzabile per mezzo della piattaforma Cureety.

### Contact

Per qualsiasi domanda o reclamo, si prega di contattare il nostro servizio di supporto:

- Per telefono al 347 519 1942
- Per email all'indirizzo [assistenza@cureety.com](mailto:assistenza@cureety.com)

	Marcatura	
<small>5.72</small> 	Dispositivo medico	
<small>5.1.10</small> 	Versione per dispositivi medici	V.4.0. 1
<small>5.1.1</small> 	Fattore	Cureety 33 Admiralty Street 22100 DINAN ·
<small>5.1.11</small> 	Paese di produzione	Francia
<small>5.1.3</small> 	Data di fabbricazione	25/04/2021
	Consultare il manuale d'uso	
<small>5.74</small> 	Sito web di informazioni per il paziente	<a href="http://app.cureety.com">app.cureety.com</a>
<small>5.7.10</small> 	Identificatore univoco del dispositivo	(01)3770026852002(11)210425(8012) 400



**Adesso è pronto ad utilizzare Cureety e fruire di tutti i benefici dell'applicazione.**

Il suo feedback è importante per noi. Se incontra un problema tecnico o ha delle domande o suggerimenti, può contattare il team IT Cureety direttamente:

- per email all'indirizzo [assistenza@cureety.com](mailto:assistenza@cureety.com)
- per telefono al numero **347 519 1942**

Ultimo aggiornamento del manuale 17/11/2023 (v4)