


Istruzioni per l'uso

La piattaforma Cureety fornisce l'accesso al dispositivo medico Cureety TechCare, un algoritmo di classificazione medica che assegna in modo intelligente questionari di follow-up personalizzati per il trattamento e la patologia dei pazienti seguiti.

Cureety TechCare è un dispositivo medico di classe I

Questo manuale d'uso è destinato esclusivamente ai pazienti che utilizzano Cureety TechCare.

1. Informazioni generali

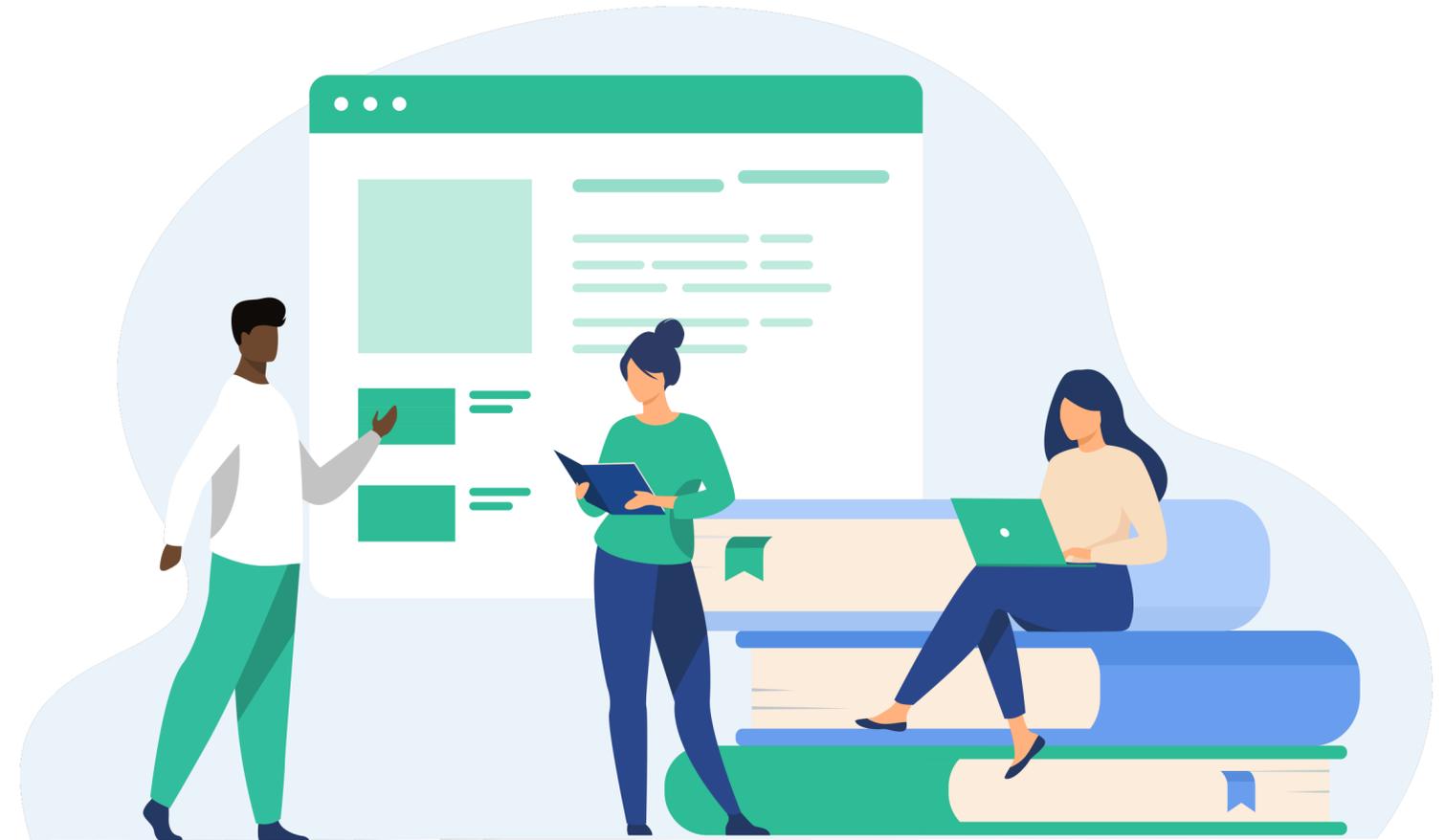

Informazioni sulla sicurezza

Utilizzo

Cureety TechCare è un'applicazione software progettata per generare una classificazione dello stato di salute dei pazienti con malattie croniche o a rischio di ospedalizzazione. Il suo scopo è quello di facilitare il telemonitoraggio degli effetti collaterali associati al trattamento ricevuto dal paziente. I pazienti riceveranno messaggi terapeutici relativi agli effetti collaterali segnalati, al fine di auto-monitorarli e migliorare la loro qualità di vita.

Controindicazioni

Il dispositivo non deve essere utilizzato da pazienti di età inferiore ai 18 anni.

Precauzioni per l'uso

- Il dispositivo deve essere utilizzato solo da pazienti con sufficiente autonomia per utilizzare gli strumenti digitali.
- Per il follow-up dei pazienti la cui autonomia è insufficiente per utilizzare gli strumenti digitali ma sufficiente per rispondere alle domande telefonicamente, il dispositivo può essere utilizzato al posto del paziente da un operatore sanitario che leggerà le domande al telefono.
- Gli operatori sanitari devono essere formati prima di utilizzare il dispositivo.
- Gli operatori sanitari devono verificare che le domande, i questionari e le classificazioni mediche proposti siano adeguati ad una corretta pratica clinica e alle condizioni cliniche del paziente. Se ritenuto necessario, è possibile modificare questi parametri per adattarli al paziente e al proprio studio.
- Per monitorare i possibili effetti collaterali segnalati dai pazienti, gli operatori sanitari devono consultare regolarmente la classificazione dei pazienti e i rapporti sintetici generati dalla piattaforma.
- Il dispositivo non è destinato ad essere utilizzato come strumento diagnostico, non può sostituire le pratiche mediche esistenti, né può sostituirsi ai consulti regolari o ad un sistema convenzionale di gestione delle emergenze mediche nel trattamento del paziente.
- Il dispositivo deve essere utilizzato con uno dei seguenti browser: Google Chrome, Firefox, Safari, Edge. Non deve essere utilizzato con Internet Explorer o qualsiasi altro browser, anche se installato di default sullo smartphone, sul tablet o sul computer.
- L'applicazione potrebbe non essere temporaneamente disponibile durante le attività di manutenzione.
- Per utilizzare il dispositivo è necessaria una connessione a Internet.
- Le aree da migliorare e/o le incongruenze nei questionari e/o nelle soglie di classificazione identificate dagli operatori sanitari devono essere segnalate a Cureety per una valutazione.
- Qualsiasi incidente grave legato all'uso del dispositivo Cureety Techcare deve essere segnalato a Cureety e alle autorità competenti del proprio Paese.

Informazioni generali

Utilizzo

L'applicazione Cureety e le funzionalità descritte nel presente manuale d'uso sono destinate esclusivamente ai pazienti che utilizzano Cureety TechCare.

Lo scopo dell'applicazione Cureety è quello di facilitare il monitoraggio e la tracciabilità degli effetti collaterali segnalati dai pazienti sottoposti a trattamenti oncologici o ematologici.

La soluzione offerta non è uno strumento diagnostico, pertanto non può sostituire le pratiche mediche esistenti, né le consultazioni regolari e un sistema convenzionale per gestire le emergenze mediche come parte del trattamento del paziente.

Controindicazioni

L'accesso all'applicazione Cureety richiede l'uso di un computer Windows o macOS, un browser internet (Chrome, Safari, Edge, Firefox) e un accesso a Internet. Il suo utilizzo non richiede particolari procedure di manutenzione, se non il normale aggiornamento del sistema operativo e del browser Internet.





Che cos'è Cureety?

Cureety offre un servizio di monitoraggio oncologico a distanza per migliorare l'assistenza e il follow-up dei pazienti.

Quali sono i vantaggi del monitoraggio remoto?

Uno studio clinico condotto negli Stati Uniti dal Dr. Ethan Basch nell'arco di 10 anni ha dimostrato che il telemonitoraggio, attraverso questionari inviati regolarmente ai pazienti, può migliorare la gestione dei malati di cancro.


Cureety, partner della vostra istituzione sanitaria

Il vostro alleato nel migliorare il vostro percorso di cura e nel facilitare gli scambi con il vostro personale curante.



Questionari adattati al vostro trattamento per condividere i vostri sintomi


Questionari facili e veloci per raccogliere gli effetti collaterali associati al trattamento e la loro gravità. I sintomi vengono inviati all'équipe sanitaria che vi contatterà se necessario.

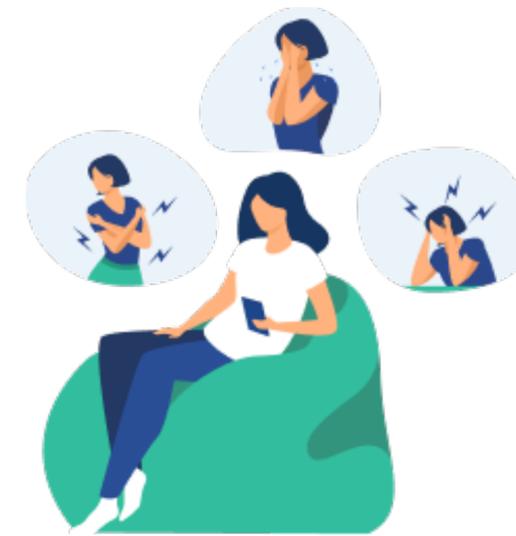

Consulto terapeutico su misura per aiutarvi a gestire i sintomi

A seguito delle risposte al questionario, vengono immediatamente comunicati consigli terapeutici personalizzati per guidarvi nella cura e aiutarvi a gestire i vostri sintomi.

I vantaggi di Cureety

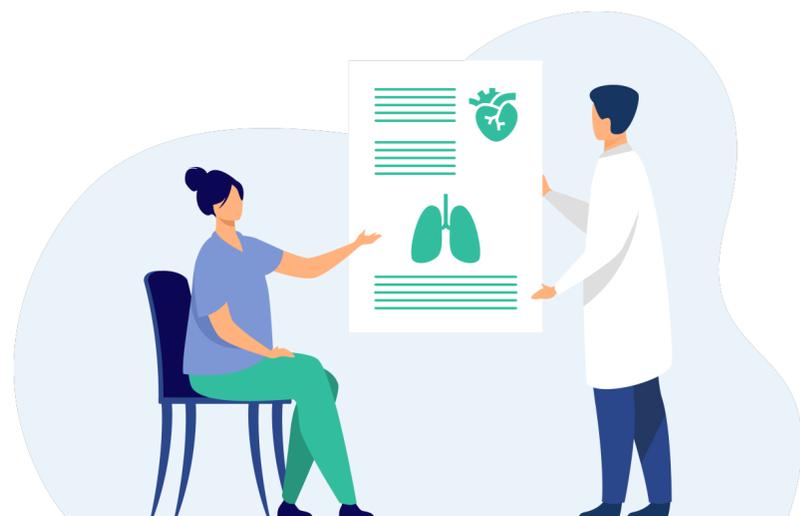

Migliora e facilita le vostre consultazioni

Tutte le informazioni inserite in Cureety vengono riassunte sotto forma di rapporti condivisi con il personale curante.



Approfitta di contenuti e cure di supporto

Cureety vi offre contenuti di educazione terapeutica e cure di supporto digitali (attività fisica adattata, ipnosi, alimentazione, ecc.) sviluppati da un rinomato comitato scientifico.



Intensifica il legame con il personale curante

Cureety consente di condividere facilmente documenti con il personale curante (risultati di esami, foto, ecc.). Il team può anche condividere prescrizioni, convocazioni per esami, linee guida terapeutiche ecc.

Come funziona Cureety?



Si riceve una notifica per rispondere al questionario sullo stato di salute, con una frequenza definita dal medico.



Compilare il questionario



Il personale curante è informato e consulta le risposte.




Riceverete consigli su come gestire i vostri sintomi



Per approfondire, è possibile accedere ai contenuti medici adattati al proprio percorso di cura (articoli, video, cure di supporto...).

Raccomandazioni terapeutiche

Dopo aver risposto al questionario sulla salute, Cureety valuta il vostro stato di salute e lo trasmette al team sanitario. Cureety fornisce consigli terapeutici, che possono essere di due tipi:

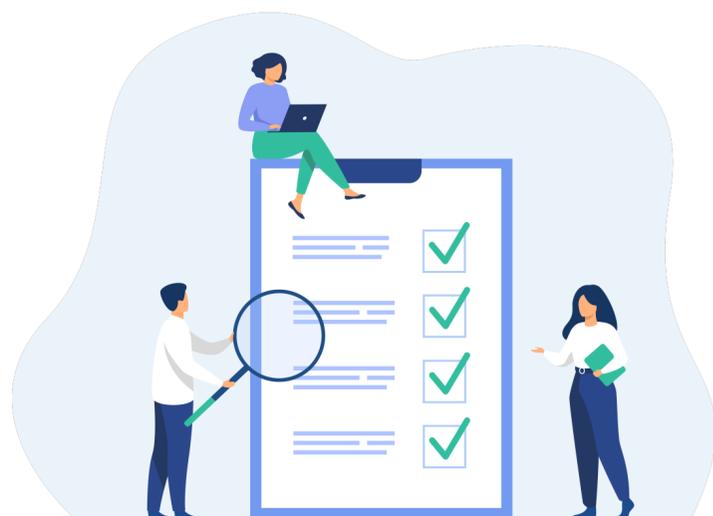

Buono stato di salute

Se si segnalano uno o più sintomi lievi, Cureety fornisce raccomandazioni terapeutiche per ciascun sintomo.



Stato di salute da monitorare

Se si segnalano uno o più sintomi da tenere sotto controllo, Cureety vi indirizzerà al team di assistenza sanitaria o ai servizi di emergenza, a seconda della gravità dei sintomi.

2. Guida all'uso



Selezionare il tipo di telefono in suo possesso

Fare clic per accedere direttamente alla relativa guida dell'utente:



un iPhone
(Apple)



un telefono Android
(Samsung, Xiaomi, OPPO, ecc.)


Guida all'utilizzo dell'applicazione mobile Cureety su Iphone



Riepilogo

- 1 Registrarsi e accedere a Cureety
- 2 Installare l'applicazione dall'App Store
- 3 Iniziare ad usare l'applicazione

Registrati e accedi a Cureety

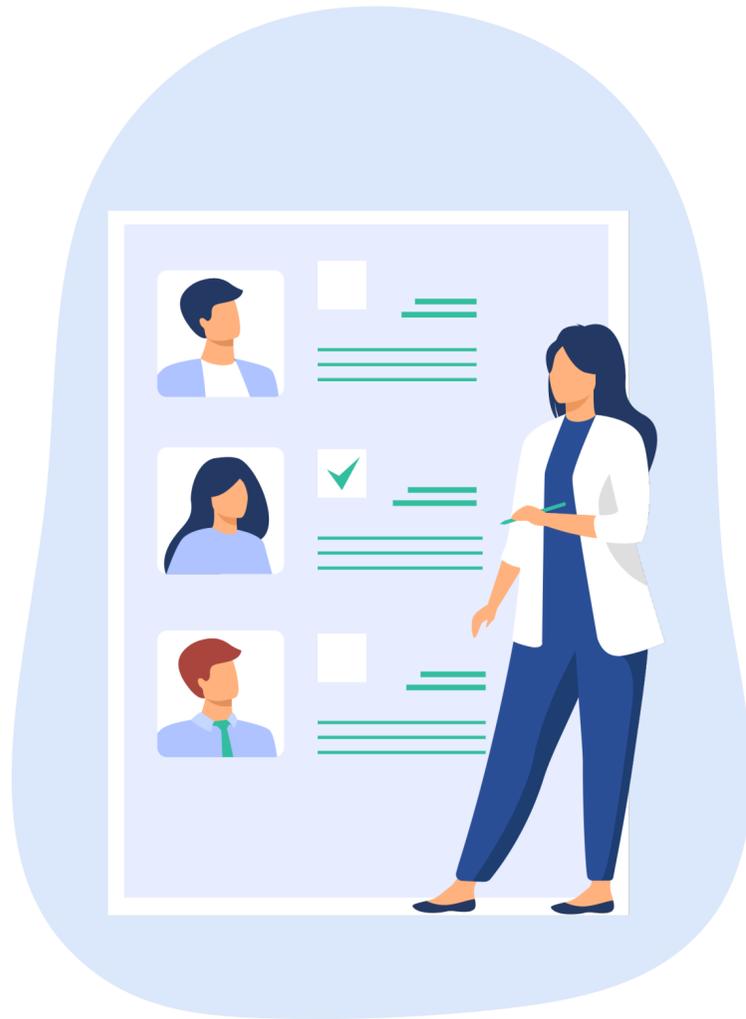

Il vostro medico vi ha preregistrato sulla piattaforma Cureety

CUREETY

Nel quadro di monitoraggio del suo percorso di cura, Dr. Laetitia ha fatto una pre-iscrizione per lei sul Cureety la piattaforma gratuita di telemonitoraggio. La invitiamo a finalizzare la sua iscrizione cliccando sul bottone « mi iscrivo » qui in basso.

Questo permette di rafforzare il legame con il suo medico e con l'infermiera(e) che la segue nella struttura sanitaria di riferimento. Grazie a Cureety, il personale medico ed infermieristico è informato degli effetti collaterali connessi al suo trattamento negli intervalli fra un consulto e l'altro, e potrà beneficiare di consigli, contenuti personalizzati e terapie di supporto.

Finalizzare l'iscrizione cliccando sul bottone « Iscriviti » in basso.

Iscriviti

Il suo codice di conferma è : YUV5Q

Riceverete un'email e un SMS: cliccare sul pulsante "Registrati"

9:41

Vai al sito

CUREETY

Accedi **Crea un account**

Sei :

Paziente Professionista sanitario

Cognome*

Nome*

Guiseppe@gmail.com

Cellulare

Credo un account su Cureety, accetti le nostre [Termini e Condizioni Generali di Utilizzo*](#)

Continua

Selezionare l'opzione "Crea un account paziente"

14:31

Lei è:

F M

Data di nascita:

01 gennaio 1900

CAP di residenza

CAP di residenza

Altezza cm Peso kg


Altezza cm Peso kg

Continua

cureety.com

Completare la registrazione inserendo i propri dati


Installare l'applicazione dall'App Store

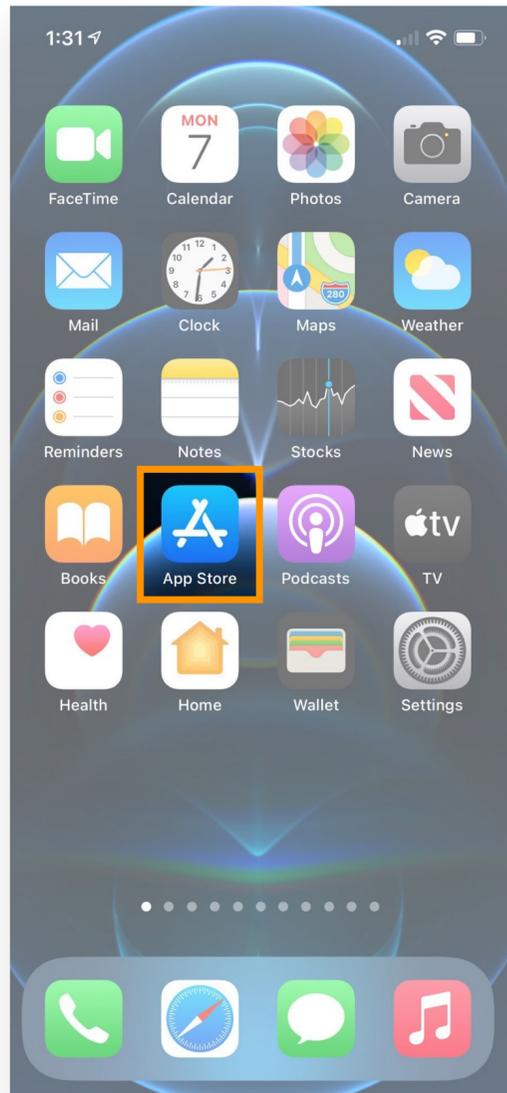

Selezionare l'icona App Store




Fare clic su Cerca

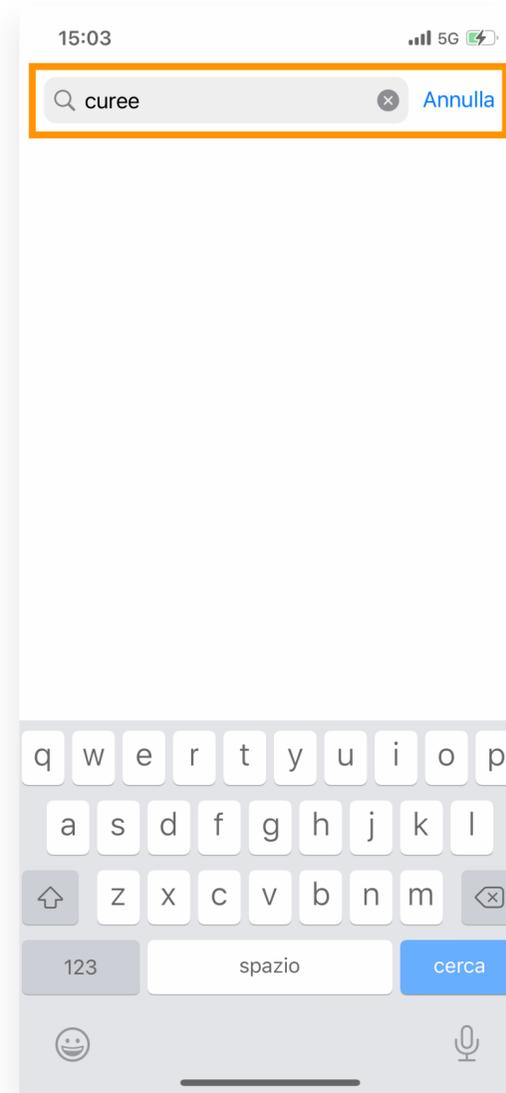


Digitare "Cureety"
nella barra di ricerca



Fare clic su Ottieni

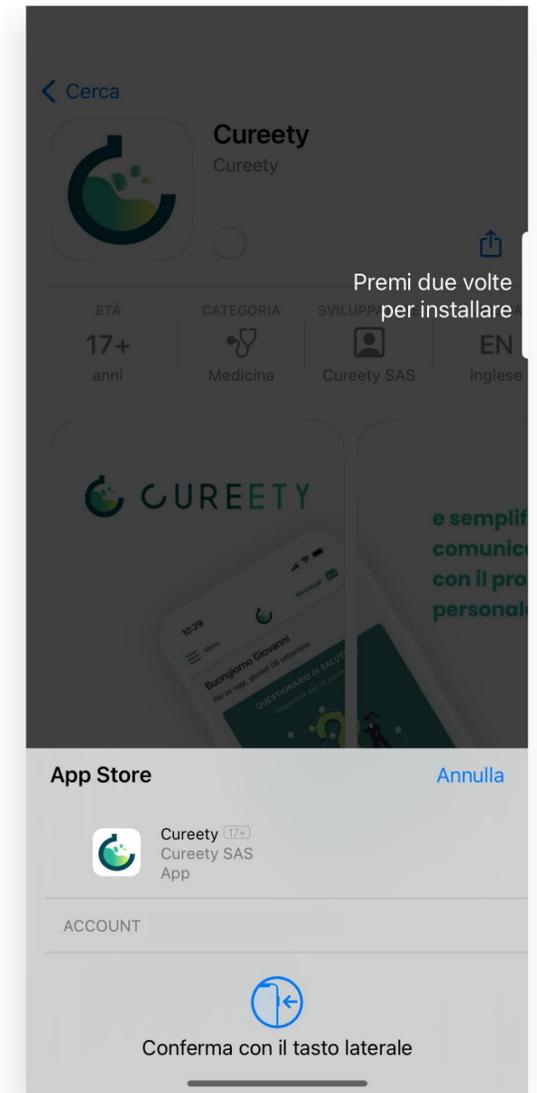

Confermare l'installazione
con il pulsante laterale o
con il pulsante principale.

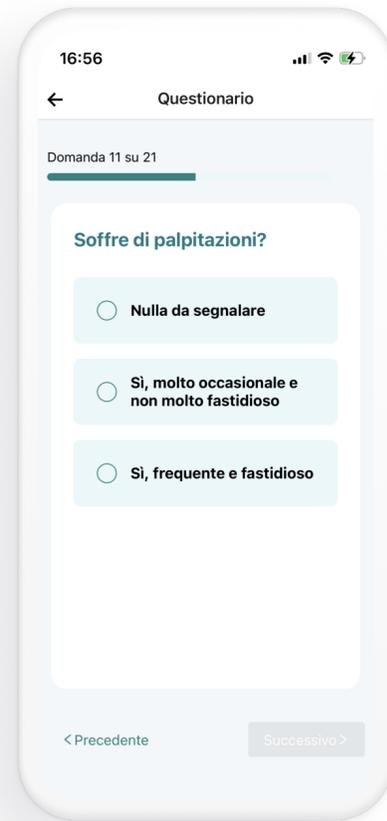

L'applicazione Cureety

Iniziare ad usare l'applicazione

L'applicazione è composta da quattro sezioni

Home



Le notizie quotidiane: questionario sulla salute, prossimi appuntamenti medici, nuovi messaggi, ecc.

Salute



Il follow-up sanitario: relazione riassuntiva dell'ultimo mese, diario, anamnesi dei sintomi e consigli, cartella clinica.

Risorse



Le risorse terapeutiche: articoli, video e file PDF selezionati per voi.

Benessere



Le cure di supporto: sessioni di attività video o audio, come l'ipnoterapia o l'attività fisica adattata.

Home



QUESTIONARIO DI SALUTE

Disponibile per 15 giorni



Comunichi i suoi sintomi al personale sanitario che la segue

Rispondere al questionario

Il questionario del giorno sulla salute

Visualizzata con la frequenza definita dal medico (ad esempio, ogni 7 giorni), questa scheda consente di compilare il questionario sulla salute. Rispondete alle domande, inviate i vostri sintomi ai vostri assistenti e scoprite i vostri consigli medici personalizzati. Se necessario, l'applicazione invita a contattare gli assistenti.

I prossimi appuntamenti medici

Le schede "agenda" ricordano gli appuntamenti medici previsti per i prossimi giorni e le azioni previste per prepararli (ad esempio, fare gli esami biologici prima della seduta di chemioterapia).

AGENDA

Consultazione

Sabato 17 settembre

15h15

Aprire l'anteprima



Scaricare in PDF



Ricevere via email



Santé



Il mio report sintetico

Il rapporto di sintesi è un file PDF che raccoglie tutti i sintomi segnalati negli ultimi 30 giorni.

È possibile scaricarlo o stamparlo.

Si raccomanda di portarlo con sé alle visite con l'oncologo.

I miei appuntamenti medici

Gli appuntamenti medici programmati per i prossimi 30 giorni appaiono qui.

Il personale curante può crearli, ma il pulsante "Aggiungi un consulto" consente anche di compilarli autonomamente.

I miei sintomi e consigli

Qui è possibile trovare il numero di sintomi segnalati nell'ultimo questionario.

Il pulsante "Visualizza i miei consigli medici" consente di accedere alla cronologia di tutti i consigli ricevuti dal primo utilizzo.

La mia cartella clinica

La cartella clinica contiene i documenti condivisi con il personale curante. È possibile aggiungere in qualsiasi momento foto, prescrizioni, analisi biologiche, ecc.

Risorse



Questa sezione contiene risorse terapeutiche che aiuteranno a comprendere meglio il vostro stato di salute e a convivere con la vostra malattia. Questi possono essere sotto forma di articoli, file PDF o video.



In primo piano

Ogni giorno, Cureety seleziona 3 contenuti da scoprire. Sono evidenziati nella parte superiore della sezione.

Malattia

[Vedi tutti \(10\) >](#)

Comprendere la mia malattia



Contenuti e categorie

Tutti i contenuti sono organizzati in diverse categorie che possono essere consultate per trovare consigli e informazioni sulla malattia, sul trattamento, sulle operazioni, ecc.

Un contenuto già consultato sarà indicato da un banner "Già letto" o "Già ascoltato".

Benessere



Questa sezione contiene sessioni audio, video o i PDF di cure di supporto da fare a casa. Le cure di supporto che vengono offerte tengono conto della vostra patologia.



Ipnoterapia

L'ipnosi può aiutare le persone affette dal cancro a gestire l'ansia e la depressione, ad alleviare il dolore... Le persone che partecipano a sedute di ipnoterapia si sentono più calme e controllate e riferiscono di avere meno disturbi del sonno.

32 sessioni disponibili

[Vedere le sessioni di ipnoterapia](#)

Categorie e sottocategorie

Le sessioni sono organizzate in categorie e sottocategorie. Attualmente esiste una categoria "Ipnoterapia", aperta a tutti i pazienti, e una categoria "Attività fisica adattata", aperta a un numero limitato di pazienti.

Sessioni di assistenza di supporto

Ogni sessione contiene un file video o audio che è possibile guardare o ascoltare un numero illimitato di volte. Facendo clic sul pulsante "Conferma sessione", si indica che la sessione è già stata completata e si possono seguire i propri progressi.



Sessione 2: Seduta di potenziamento muscolare da seduti


Potenziamento muscolare da seduti. Durante questa sessione verranno svolti diversi esercizi di potenziamento muscolare, non preoccuparti di percepire l'attività muscolare, è del tutto normale. Ricordati di idratarti regolarmente e soprattutto di non sforzare troppo il tuo fisico.

Per vedere il video della sessione cliccare sul pulsante « play » qui sopra

[Convalidare la sessione](#)

[Annullare](#)

Menu

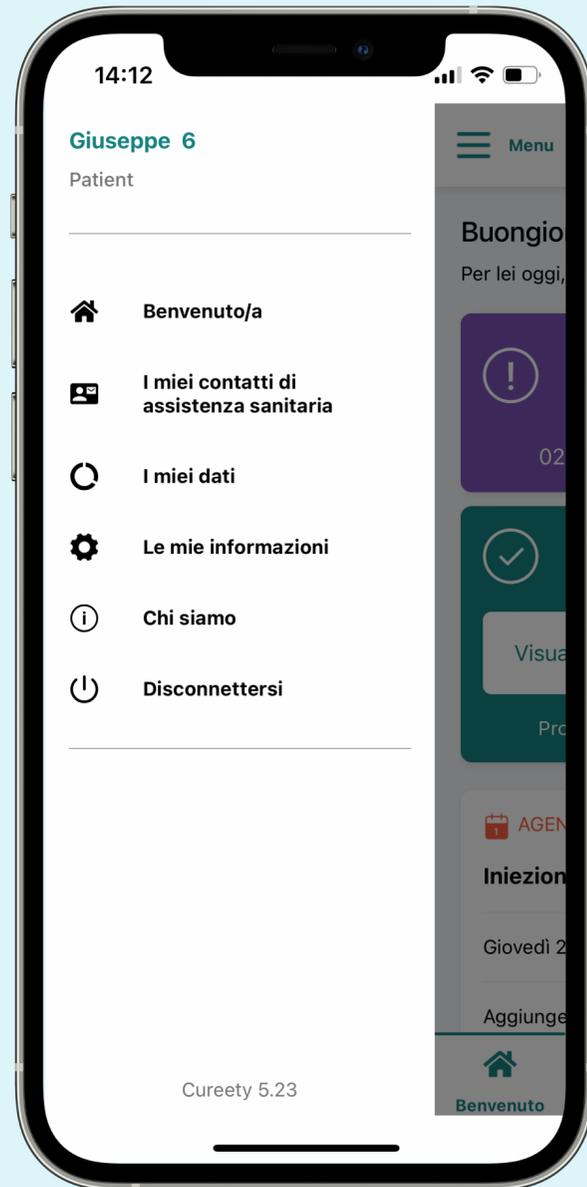

I miei contatti di assistenza sanitaria

Questa sezione contiene le informazioni di contatto del team sanitario. È possibile aggiungere altri contatti che potrebbero essere utili (farmacista, medico di famiglia, laboratorio, ecc.).

Le mie informazioni

Questa sezione contiene tutte le informazioni personali. Ad esempio, è possibile modificare il peso o la lingua utilizzata nell'applicazione.

Disconnettersi

Questo pulsante consente di uscire dall'applicazione.

I miei dati

Questa sezione contiene le clausole che sono state accettate in relazione all'utilizzo dei propri dati sanitari. Nel caso cambiasse idea, è disponibile un modulo di obiezione.

Chi siamo

Questa sezione consente di tenere traccia degli aggiornamenti dell'applicazione Cureety TechCare e del dispositivo medico.

Come annullare l'iscrizione alla piattaforma Cureety

Per annullare l'iscrizione alla piattaforma Cureety, si prega di inviare un'email al seguente indirizzo: support@cureety.com

Poiché Cureety TechCare è un dispositivo medico, si consiglia di discuterne preventivamente con il proprio personale curante.


Guida all'utilizzo dell'applicazione mobile Cureety su Android



Riepilogo

- 1 Registrarsi e accedere a Cureety
- 2 Installare l'applicazione dall'App Store
- 3 Iniziare ad usare l'applicazione

Registrati e accedi a Cureety

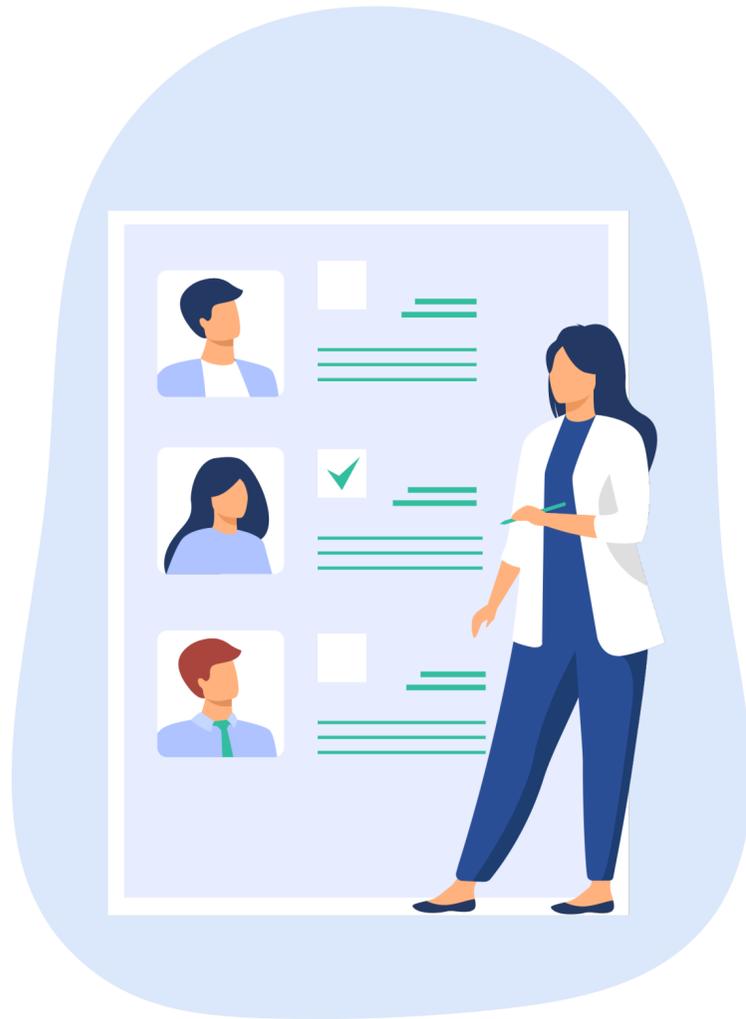

Il vostro medico vi ha preregistrato sulla piattaforma Cureety

CUREETY

Nel quadro di monitoraggio del suo percorso di cura, Dr. Laetitia ha fatto una pre-iscrizione per lei sul Cureety la piattaforma gratuita di telemonitoraggio. La invitiamo a finalizzare la sua iscrizione cliccando sul bottone « mi iscrivo » qui in basso.

Questo permette di rafforzare il legame con il suo medico e con l'infermiera(e) che la segue nella struttura sanitaria di riferimento. Grazie a Cureety, il personale medico ed infermieristico è informato degli effetti collaterali connessi al suo trattamento negli intervalli fra un consulto e l'altro, e potrà beneficiare di consigli, contenuti personalizzati e terapie di supporto.

Finalizzare l'iscrizione cliccando sul bottone « Iscriviti » in basso.

Iscriviti

Il suo codice di conferma è : YUV5Q

Riceverete un'email e un SMS: cliccare sul pulsante "Registrati"

9:41

Vai al sito

CUREETY

Accedi **Crea un account**

Sei :

Paziente Professionista sanitario

Cognome*

Nome*

Guiseppe@gmail.com

Cellulare

Credo un account su Cureety, accetti le nostre [Termini e Condizioni Generali di Utilizzo*](#)

Continua

Selezionare l'opzione "Crea un account paziente"

14:31

Lei è:

F M

Data di nascita:

01 gennaio 1900

CAP di residenza

CAP di residenza

Altezza cm Peso kg


Altezza cm Peso kg

Continua


cureety.com

Completare la registrazione inserendo i propri dati


Installare l'applicazione da Play Store

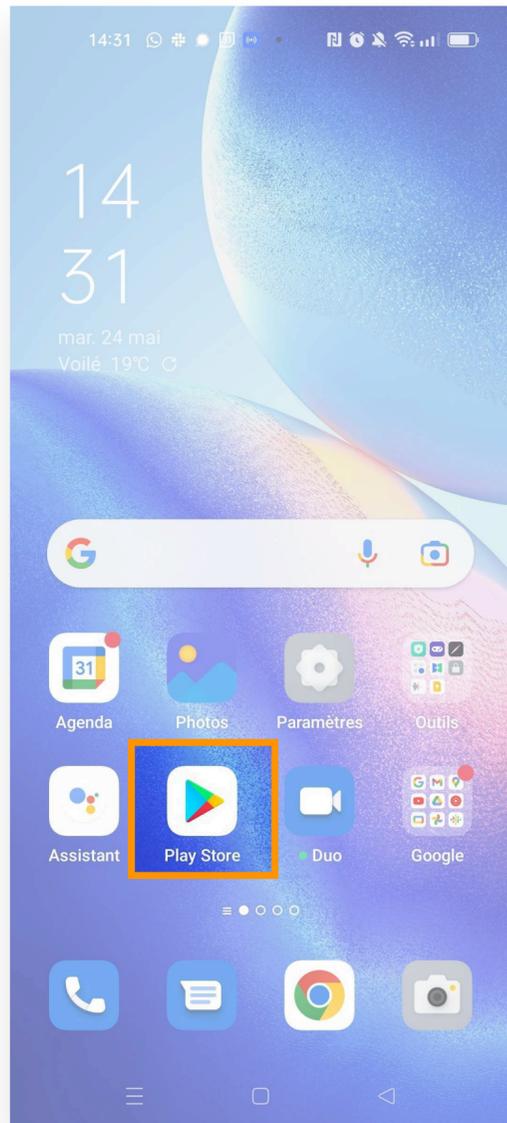


Selezionare l'icona Play Store

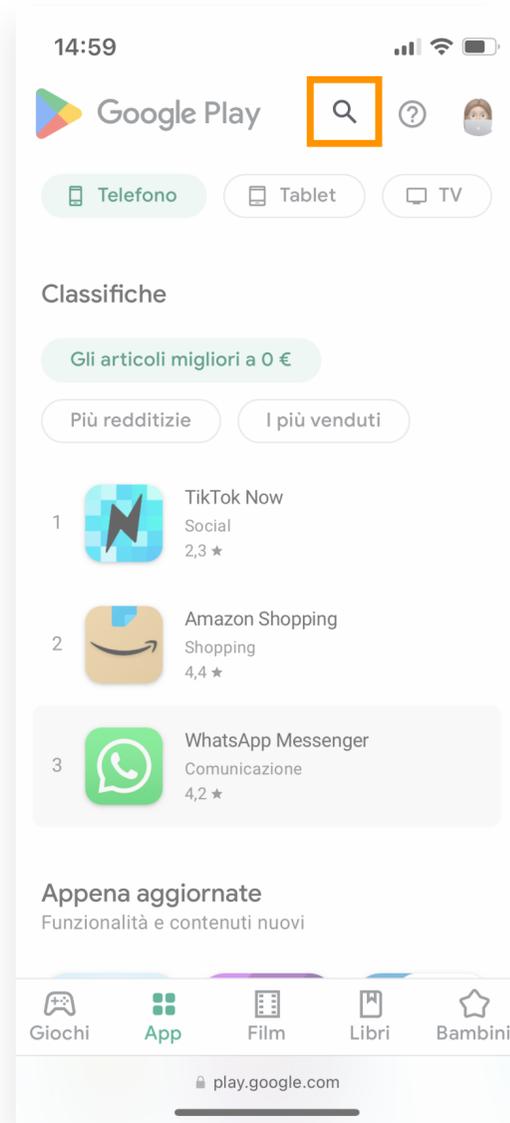


Posizionarsi nella barra di ricerca

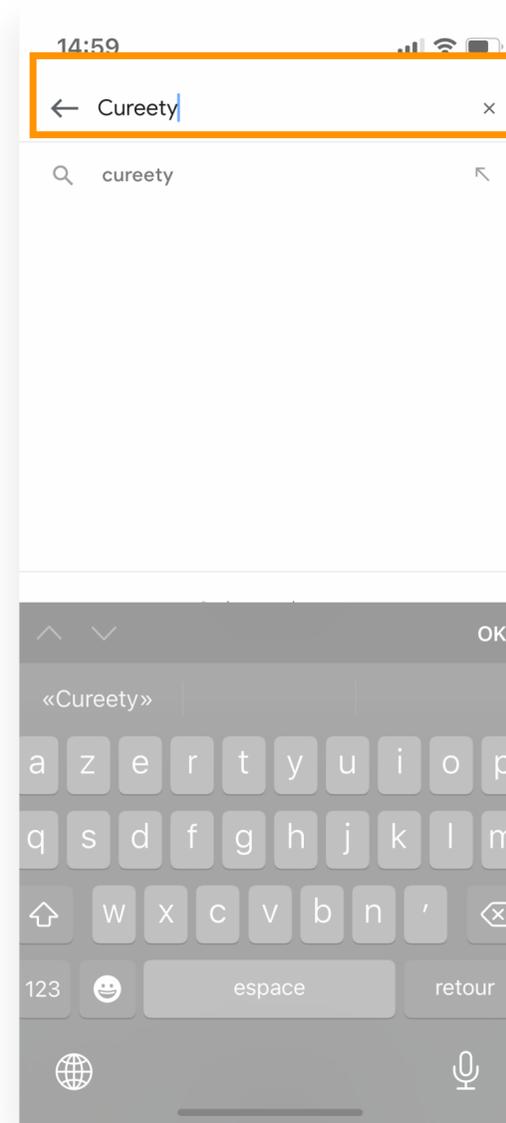


Cercare l'applicazione Cureety

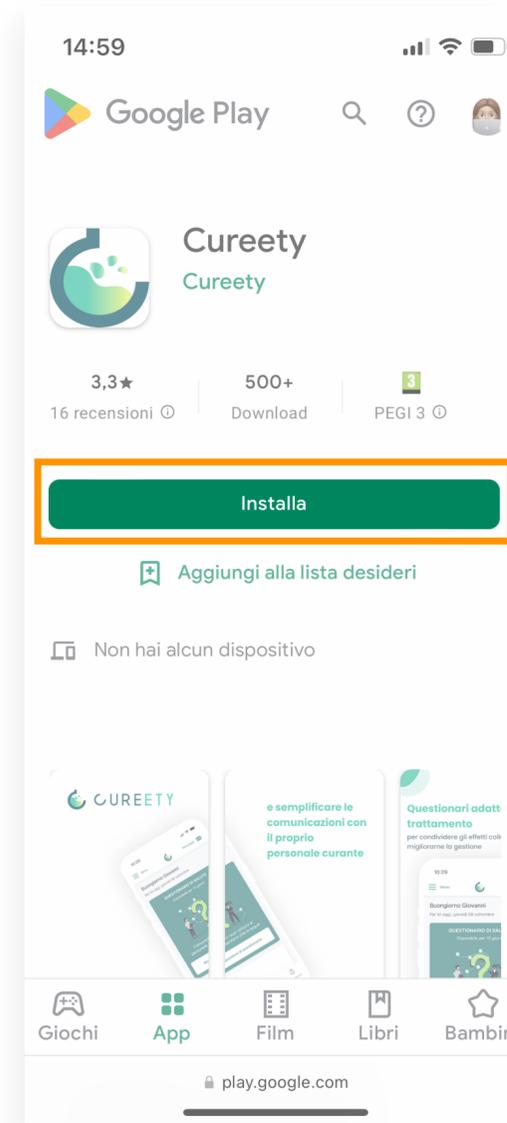

Fare clic su Installa

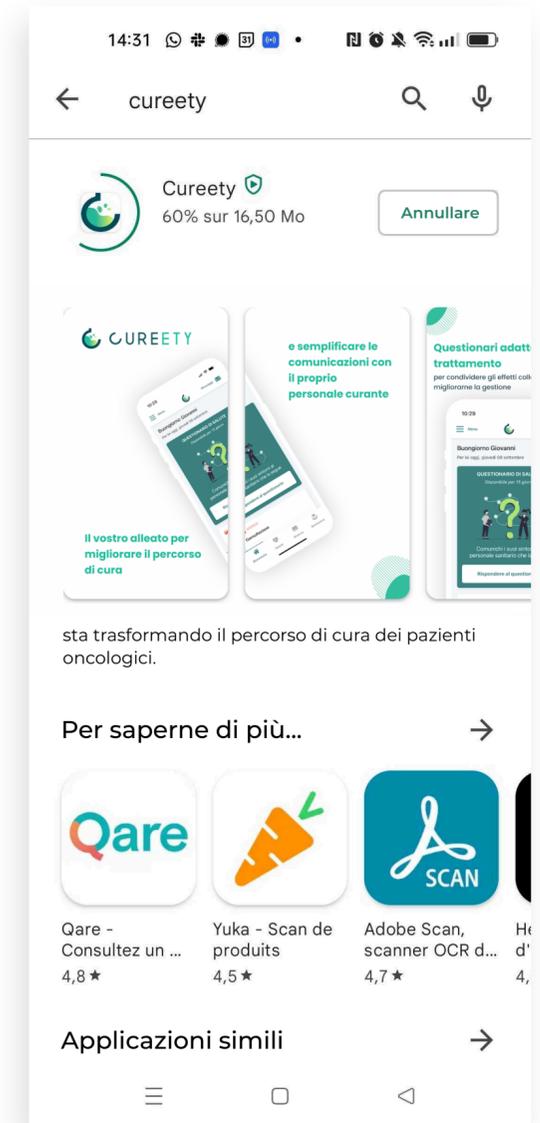

L'applicazione si scarica e si installa automaticamente

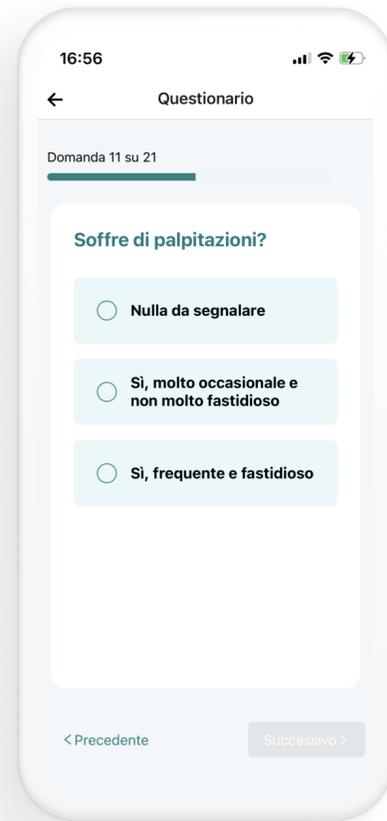

L'applicazione Cureety

Iniziare ad usare l'applicazione

L'applicazione è composta da quattro sezioni

Home



Le notizie quotidiane: questionario sulla salute, prossimi appuntamenti medici, nuovi messaggi, ecc.

Salute



Il follow-up sanitario: relazione riassuntiva dell'ultimo mese, diario, anamnesi dei sintomi e consigli, cartella clinica.

Risorse




Le risorse terapeutiche: articoli, video e file PDF selezionati per voi.

Benessere



Le cure di supporto: sessioni di attività video o audio, come l'ipnoterapia o l'attività fisica adattata.

Home

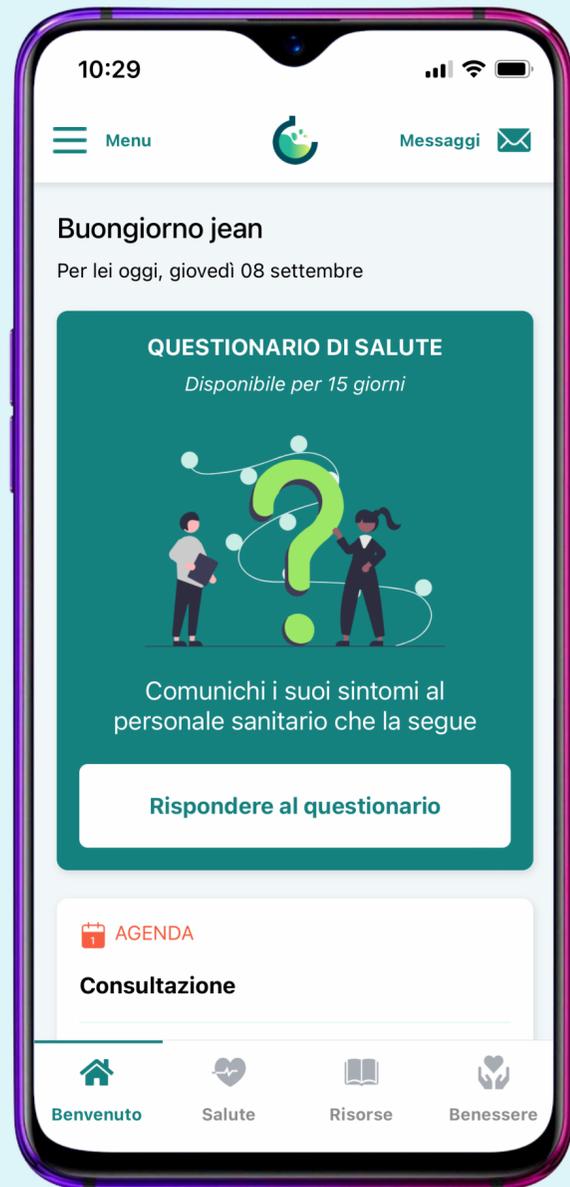

QUESTIONARIO DI SALUTE

Disponibile per 15 giorni



Comunichi i suoi sintomi al personale sanitario che la segue

Rispondere al questionario

Il questionario del giorno sulla salute

Visualizzata con la frequenza definita dal medico (ad esempio, ogni 7 giorni), questa scheda consente di compilare il questionario sulla salute. Rispondete alle domande, inviate i vostri sintomi ai vostri assistenti e scoprite i vostri consigli medici personalizzati. Se necessario, l'applicazione invita a contattare gli assistenti.

I prossimi appuntamenti medici

Le schede "agenda" ricordano gli appuntamenti medici previsti per i prossimi giorni e le azioni previste per prepararli (ad esempio, fare gli esami biologici prima della seduta di chemioterapia).

AGENDA

Consultazione

Sabato 17 settembre

15h15

Aprire l'anteprima



Scaricare in PDF



Ricevere via email



Salute



Il mio report sintetico

Il rapporto di sintesi è un file PDF che raccoglie tutti i sintomi segnalati negli ultimi 30 giorni.

È possibile scaricarlo o stamparlo.

Si raccomanda di portarlo con sé alle visite con l'oncologo.

I miei appuntamenti medici

Gli appuntamenti medici programmati per i prossimi 30 giorni appaiono qui.

Il personale curante può crearli, ma il pulsante "Aggiungi un consulto" consente anche di compilarli autonomamente.

I miei sintomi e consigli

Qui è possibile trovare il numero di sintomi segnalati nell'ultimo questionario.

Il pulsante "Visualizza i miei consigli medici" consente di accedere alla cronologia di tutti i consigli ricevuti dal primo utilizzo.

La mia cartella clinica

La cartella clinica contiene i documenti condivisi con il personale curante. È possibile aggiungere in qualsiasi momento foto, prescrizioni, analisi biologiche, ecc.

Risorse



Questa sezione contiene risorse terapeutiche che aiuteranno a comprendere meglio il vostro stato di salute e a convivere con la vostra malattia. Questi possono essere sotto forma di articoli, file PDF o video.



In primo piano

Ogni giorno, Cureety seleziona 3 contenuti da scoprire. Sono evidenziati nella parte superiore della sezione.

Malattia

[Vedi tutti \(10\) >](#)

Comprendere la mia malattia



Contenuti e categorie

Tutti i contenuti sono organizzati in diverse categorie che possono essere consultate per trovare consigli e informazioni sulla malattia, sul trattamento, sulle operazioni, ecc.

Un contenuto già consultato sarà indicato da un banner "Già letto" o "Già ascoltato".

Bien-être



Questa sezione contiene sessioni audio, video o i PDF di cure di supporto da fare a casa. Le cure di supporto che vengono offerte tengono conto della vostra patologia.



Ipnoterapia

L'ipnosi può aiutare le persone affette dal cancro a gestire l'ansia e la depressione, ad alleviare il dolore... Le persone che partecipano a sedute di ipnoterapia si sentono più calme e controllate e riferiscono di avere meno disturbi del sonno.

32 sessioni disponibili

[Vedere le sessioni di ipnoterapia](#)

Categorie e sottocategorie

Le sessioni sono organizzate in categorie e sottocategorie. Attualmente esiste una categoria "Ipnoterapia", aperta a tutti i pazienti, e una categoria "Attività fisica adattata", aperta a un numero limitato di pazienti.

Sessioni di assistenza di supporto

Ogni sessione contiene un file video o audio che è possibile guardare o ascoltare un numero illimitato di volte. Facendo clic sul pulsante "Conferma sessione", si indica che la sessione è già stata completata e si possono seguire i propri progressi.



Sessione 2: Seduta di potenziamento muscolare da seduti


Potenziamento muscolare da seduti. Durante questa sessione verranno svolti diversi esercizi di potenziamento muscolare, non preoccuparti di percepire l'attività muscolare, è del tutto normale. Ricordati di idratarti regolarmente e soprattutto di non sforzare troppo il tuo fisico.

Per vedere il video della sessione cliccare sul pulsante « play » qui sopra

[Convalidare la sessione](#)

[Annullare](#)

Menu

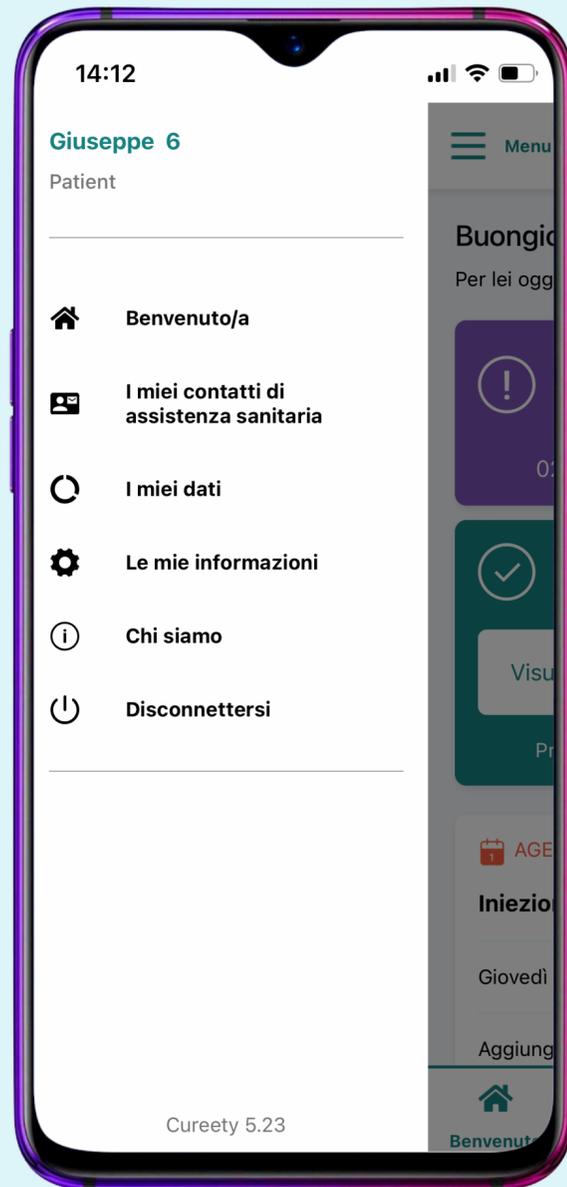

I miei contatti di assistenza sanitaria

Questa sezione contiene le informazioni di contatto del team sanitario. È possibile aggiungere altri contatti che potrebbero essere utili (farmacista, medico di famiglia, laboratorio, ecc.).

Le mie informazioni

Questa sezione contiene tutte le informazioni personali. Ad esempio, è possibile modificare il peso o la lingua utilizzata nell'applicazione.

Disconnettersi

Questo pulsante consente di uscire dall'applicazione.

I miei dati

Questa sezione contiene le clausole che sono state accettate in relazione all'utilizzo dei propri dati sanitari. Nel caso cambiasse idea, è disponibile un modulo di obiezione.

Chi siamo

Questa sezione consente di tenere traccia degli aggiornamenti dell'applicazione Cureety TechCare e del dispositivo medico.

Come annullare l'iscrizione alla piattaforma Cureety

Per annullare l'iscrizione alla piattaforma Cureety, si prega di inviare un'email al seguente indirizzo: support@cureety.com

Poiché Cureety TechCare è un dispositivo medico, si consiglia di discuterne preventivamente con il proprio team sanitario.

3. Domande frequenti





Qual è il vantaggio di Cureety per il mio medico?

Con le risposte giornaliere al questionario, il medico può rapidamente farsi un'idea della vostra capacità di affrontare il trattamento. In questo modo potrà dedicare più tempo al consulto, fornendovi consigli ad alto valore aggiunto per il resto del trattamento.



I miei dati sono protetti?

Utilizzando Cureety si forniscono dati sensibili e personali sulla propria salute. Pertanto, tutti i dati sono anonimizzati, criptati e mantenuti su una piattaforma certificata. Cureety ospita un database certificato HADS (Hébergeur Agréé de Données de Santé), in modo che i vostri dati non lascino mai l'UE.



Come posso segnalare un effetto collaterale che non è suggerito nell'elenco delle domande?

L'ultima domanda di ogni questionario è a risposta aperta e libera. Qui è possibile segnalare i sintomi non presenti nel questionario. In caso di sintomi ritenuti gravi o urgenti, si prega di chiamare direttamente l'ospedale o il proprio medico.



Cureety Techcare



Cureety TechCare è un'applicazione software progettata per generare una classificazione dello stato clinico dei pazienti con malattie croniche o a rischio di ospedalizzazione, al fine di facilitare il monitoraggio medico a distanza dei segni clinici e dei possibili eventi avversi, oltre ai consulti fisici. I pazienti possono leggere messaggi informativi relativi al loro stato clinico, al fine di auto-monitorare e migliorare la loro qualità di vita.

Cureety TechCare è un dispositivo medico secondo le normative europee. Viene utilizzato tramite la piattaforma Cureety.




Contatto :

Per qualsiasi richiesta di supporto o reclamo, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza:

- Per telefono: 07 66 72 30 47

- Per e-mail: support@cureety.com

Simbolo	Significato	Informazione
	Marcatura	
^{5.7.7} 	Dispositivo medico	
^{5.1.10} 	Versione per dispositivi medici	V.4.0. 1
^{5.1.1} 	Fattore	Cureety 33 Admiralty Street 22100 DINAN
^{5.1.11} 	Paese di produzione	Francia
^{5.1.3} 	Data di fabbricazione	25/04/2021
	Consultare il manuale d'uso	
^{5.7.4} 	Sito web di informazioni per il paziente	app.cureety.com
^{5.7.10} 	Identificatore univoco del dispositivo	(01)3770026852002(11)210425(8012)400

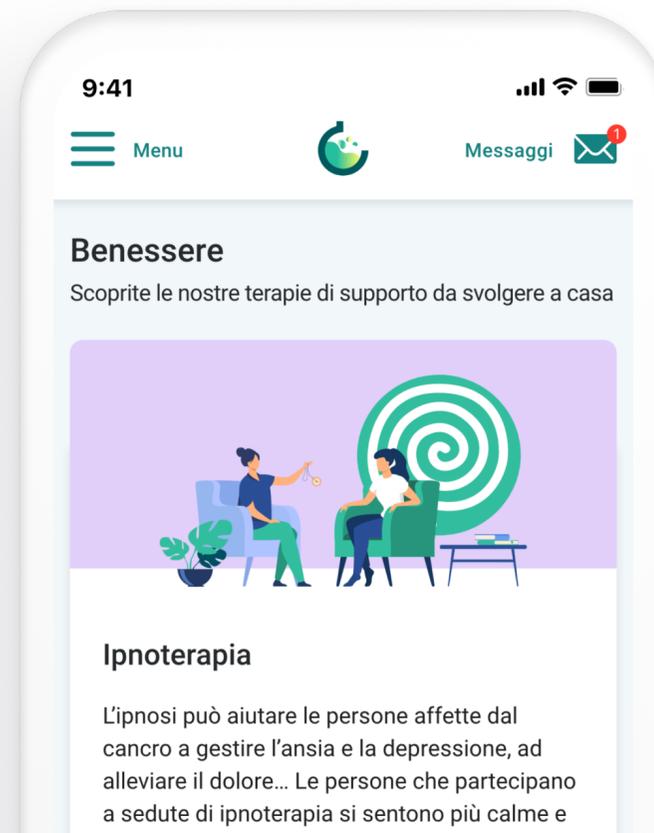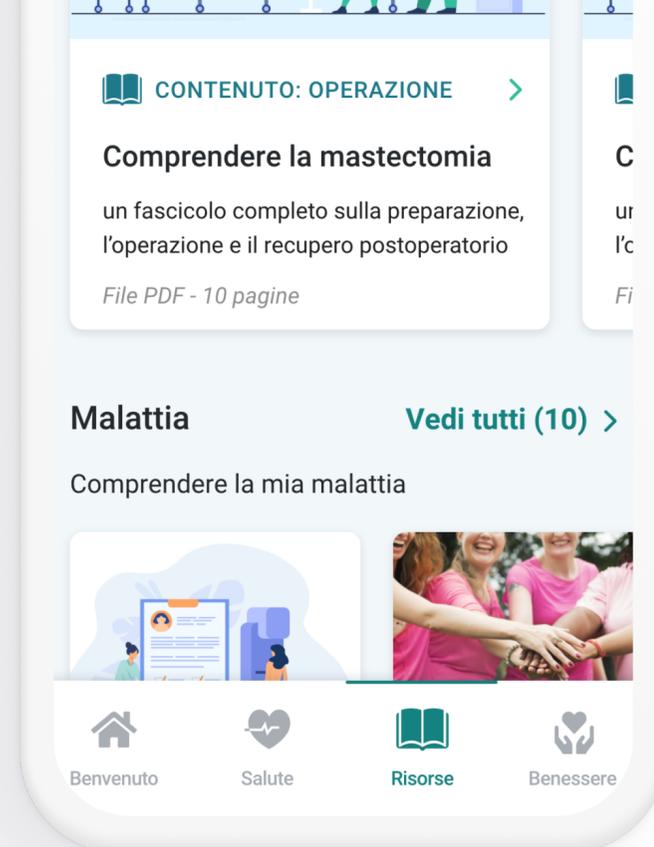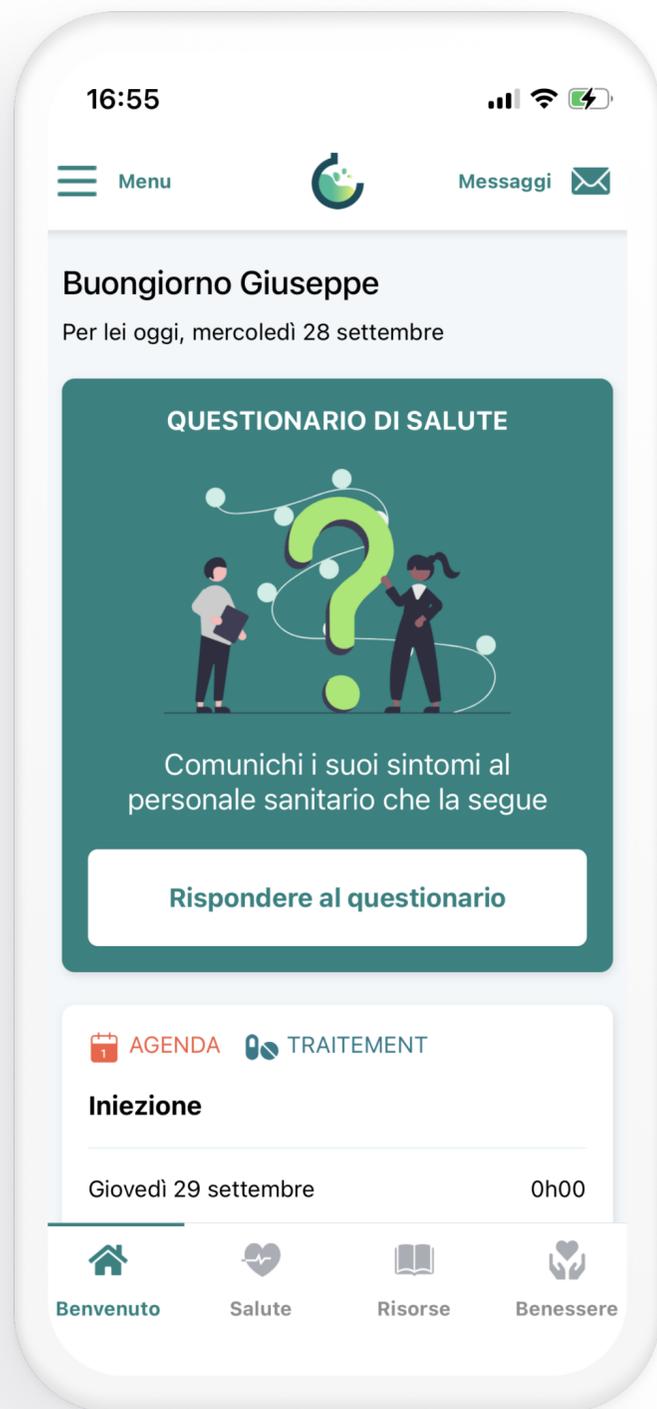

Ora siete pronti ad utilizzare Cureety e beneficiare di tutti i vantaggi dell'applicazione.

Il vostro feedback è importante per noi. Se riscontrate problemi tecnici o avete domande e suggerimenti, potete contattare direttamente il team IT di Cureety:

Per telefono: 07 66 72 30 47

Per e-mail: support@cureety.com

Ultimo aggiornamento del manuale il 05/10/2022 (v3)